



Entfernungs- instrumente

Lösungen für
JEDE SITUATION

Produktüberblick



ABUTMENTENTFERNUNG

Das Entfernen eines Abutments, das in einer konischen Verbindung festsitzt, ist mit dem Abutment-Entfernungsstift einfach zu bewerkstelligen.

Für Versorgungen aus Titan und Zirkondioxid, einschließlich des NobelProcera® Abutments mit abgewinkeltem Schraubenkanal (ASC) und der Full-contour Zirconia (FCZ) Implantatkrone, wird das Entfernen durch eine Reihe spezieller Entfernungsinstrumente für Abutments erleichtert.



ENTFERNEN VON ABUTMENT-/KLINISCHEN SCHRAUBEN

Für den Fall, dass eine Abutmentschraube bricht, gibt es selbst dann eine sichere Lösung, wenn ein Teil der Schraube im Schraubenkanal verbleibt.

Während mit dem Abutmentschraubenentferner der Großteil solcher Vorfälle effizient behoben werden kann, ermöglichen rückwärts drehende Bohrer und Abutmentschrauben-Entfernungsinstrument das Entfernen in komplexeren Fällen.



IMPLANTATENTFERNUNG

Sie müssen ein Implantat entfernen, bei dem der Implantateindreher nicht mehr richtig greift?

Das Implantat-Entfernungsinstrument wurde genau für dieses Szenario entwickelt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Ursache ein gebrochenes Implantat, eine beschädigte Verbindung oder eine zu feste Osseointegration ist. Für schwierigere Fälle sind Trepanbohrer erhältlich.

Implantat-Entfernungsinstrumente

Implantat-Entfernungsinstrumente

		Triovale konische Innenverbindung	Konische Innenverbindung	Dreikanal-Verbindung	Außensechskant-Verbindung
22 mm	37471			NP, RP	NP, RP
31 mm	37472			NP, RP	NP, RP
31 mm	37473		3.0		
22 mm	37474		NP		WP
22 mm	37475		RP	WP	
22 mm	37476			6.0	
22 mm	37927		WP		
31 mm	301294	NP	3.0		
22 mm	301295	RP	RP	WP	



Führungshülse für Implantat-Entfernungsinstrument

Ø		Dreikanal-Verbindung
3,5 mm	37478	NP
4,3 mm	37479	RP



Trepanbohrer

Ø		Triovale konische Innenverbindung	Konische Innenverbindung	Dreikanal-Verbindung	Außensechskant-Verbindung
3,2/4,0 mm	37477		3.0		
3,8/4,6 mm	37928	NP	NP	NP	NP
4,4/5,2 mm	37929	RP	RP	RP, NobelReplace Platform Switching NP	RP
5,2/6,2 mm	37930		RP	WP, NobelReplace Platform Switching RP	WP
5,6/6,6 mm	37931		WP		
6,2/7,0 mm	37932			6.0, NobelReplace Platform Switching WP	WP



Handstück für Führungshülsen	37480
------------------------------	-------



Abutmentschrauben-Entfernungsinstrumente

Abutmentschraubenentferner

	Triovale konische Innenverbindung	Konische Innenverbindung	Dreikanal-Verbindung	Außensechskant-Verbindung
3.0		37505		
NP	37505, 37506, 37507	37506	37506	37506
RP	37505, 37506, 37507	37507	37507	37507
WP, 6.0		37507	37507	37507



Schrauben-Entfernungsinstrument für Nobel Biocare N1™ Base

Triovale konische Innenverbindung	
NP, RP	301702



Reparaturgewindeschneider

		Triovale konische Innenverbindung	Konische Innenverbindung	Dreikanal-Verbindung	Außensechskant-Verbindung
M1,4	37497		3.0		
M1,6	37498		NP		NP
M1,8	37499			NP	
M2	37517		RP, WP	RP, WP, 6.0	RP
M2,5	37500				WP
	301151	NP			
	301152	RP			



Abutmentschrauben-Entfernungsinstrumente

Bohrer zum Entfernen von Abutmentschrauben

	Triovale konische Innenverbindung	Konische Innenverbindung	Dreikanal-Verbindung	Außensechskant-Verbindung
3.0		37501, 301296		
NP	301296	37501, 301296	37501	37501
RP	301296	37502	37502	37502
WP, 6.0		37502	37502	37502



Abutmentschrauben-Entfernungsinstrument

	Triovale konische Innenverbindung	Konische Innenverbindung	Dreikanal-Verbindung	Außensechskant-Verbindung
3.0		37503, 301297		
NP	301297	37503, 301297	37503	37503
RP	301297	37504	37504	37504
WP, 6.0		37504	37504	37504



Führungshülse

	Triovale konische Innenverbindung	Konische Innenverbindung	Dreikanal-Verbindung	Außensechskant-Verbindung
3.0		37485		
NP	300919	37486	37488	37482
RP	300920	37487	37489	37483
WP		37933	37490	37484
6.0			37491	



Handstück für Führungshülsen

37480



Handstück für Maschineninstrumente

29161



Abutment-Entfernungsinstrumente

Abutment-Entfernungsinstrument Zirkondioxid

	Konische Innenverbindung
NP	37512
RP, WP	37882



Abutment-Entfernungsinstrument Titan

	Triovale konische Innenverbindung	Konische Innenverbindung
NP	301521 (lang), 301533 (kurz)	36247
RP	301522 (lang), 301534 (kurz)	37881
WP		37881



Abutment-Entfernungsstift

	Konische Innenverbindung
3.0	37509
NP	37510
RP, WP	37511



Einheitliche Farbcodierung

Prothetische Komponenten sind für eine schnelle und präzise Identifikation farbcodiert.

3.0	NP	RP	WP
Platform 3.0	Narrow Platform	Regular Platform	Wide Platform

Sets

Implantatentfernung

87309 Implantatentfernungs-Set

Set beinhaltet Folgendes:		Anzahl
301343	Organizer für Implantatentfernungs-Set	1
37471	Implantat-Entfernungsinstrument Außensechskant- und Dreikanal-Verbindung NP/RP 22 mm	1
37472	Implantat-Entfernungsinstrument Außensechskant- und Dreikanal-Verbindung NP/RP 31 mm	1
37473	Implantat-Entfernungsinstrument CC 3.0 31 mm	1
37474	Implantat-Entfernungsinstrument CC NP und Außensechskant-Verbindung WP 22 mm	1
37475	Implantat-Entfernungsinstrument CC RP und Dreikanal-Verbindung WP 22 mm	1
37476	Implantat-Entfernungsinstrument Dreikanal-Verbindung 6.0 22 mm	1
37927	Implantat-Entfernungsinstrument CC WP 22 mm	1
37477	Trepanbohrer 3,2/4,0 mm	1
37928	Trepanbohrer 3,8/4,6 mm	1
37929	Trepanbohrer 4,4/5,2 mm	1
37930	Trepanbohrer 5,2/6,2 mm	1
37931	Trepanbohrer 5,6/6,6 mm	1
37932	Trepanbohrer 6,2/7,0 mm	1
37478	Führungshülse Dreikanal-Verbindung Ø 3,5	1
37479	Führungshülse Dreikanal-Verbindung Ø 4,3	1
37480	Handstück für Führungshülsen	1



Hinweis: Der Set-Inhalt kann sich je nach Markt unterscheiden. Bei der Set-Artikelnummer handelt es sich um eine interne Bestellnummer, die nicht auf Lieferscheinen und Rechnungen aufgeführt wird. Die Artikel aus den Sets können auch einzeln bestellt werden.

Sets

Abutmentschrauben-Entfernung

87308 Set für Abutmentschrauben-Entfernung

Set beinhaltet Folgendes:	Anzahl
301344 Organizer für Kit für Abutmentschrauben-Entfernung	1
37482 Führungshülse Außensechskant-Verbindung NP	1
37483 Führungshülse Außensechskant-Verbindung RP	1
37484 Führungshülse Außensechskant-Verbindung WP	1
37485 Führungshülse konische Innenverbindung 3.0	1
37486 Führungshülse konische Innenverbindung NP	1
37487 Führungshülse konische Innenverbindung RP	1
37933 Führungshülse konische Innenverbindung WP	1
37488 Führungshülse Dreikanal-Verbindung NP	1
37489 Führungshülse Dreikanal-Verbindung RP	1
37490 Führungshülse Dreikanal-Verbindung WP	1
37491 Führungshülse Dreikanal-Verbindung 6.0	1
37501 Bohrer zum Entfernen von Abutmentschrauben 3.0/NP	2
37502 Bohrer zum Entfernen von Abutmentschrauben RP/WP/6.0	2
37503 Abutmentschrauben-Entfernungsinstrument 3.0/NP	1
37504 Abutmentschrauben-Entfernungsinstrument RP/WP/6.0	1
37505 Abutmentschraubenentferner 3.0	1
37506 Abutmentschraubenentferner NP	1

87308 Set für Abutmentschrauben-Entfernung

Set beinhaltet Folgendes:	Anzahl
37507 Abutmentschraubenentferner RP/WP/6.0	1
37497 Reparaturgewindeschneider M1.4	1
37498 Reparaturgewindeschneider M1.6	1
37499 Reparaturgewindeschneider M1.8	1
37517 Reparaturgewindeschneider M2.0	1
37500 Reparaturgewindeschneider M2.5	1
37480 Handstück für Führungshülsen	1
29161 Handstück für Maschineninstrumente	1



Hinweis: Der Set-Inhalt kann sich je nach Markt unterscheiden. Bei der Set-Artikelnummer handelt es sich um eine interne Bestellnummer, die nicht auf Lieferscheinen und Rechnungen aufgeführt wird. Die Artikel aus den Sets können auch einzeln bestellt werden.

Sets

Abumententfernung

87338 Abumententfernungs-Set

Set beinhaltet Folgendes:		Anzahl
37509	Abument-Entfernungsstift CC 3.0	1
37510	Abument-Entfernungsstift CC NP	1
37511	Abument-Entfernungsstift CC RP/WP	1
37512	Abument-Entfernungsinstrument Zirkondioxid CC NP	1
37882	Abument-Entfernungsinstrument konische Innenverbindung RP/WP Zirkondioxid	1
36247	Abument-Entfernungsschlüssel konische Innenverbindung NP Titan	1
37881	Abument-Entfernungsinstrument konische Innenverbindung RP/WP Titan	1

Hinweis: Der Set-Inhalt kann sich je nach Markt unterscheiden. Bei der Set-Artikelnummer handelt es sich um eine interne Bestellnummer, die nicht auf Lieferscheinen und Rechnungen aufgeführt wird. Die Artikel aus den Sets können auch einzeln bestellt werden.



ONLINE BESTELLEN

Unser gesamtes Sortiment an Implantaten und vorgefertigter Prothetik kann rund um die Uhr im Online Store von Nobel Biocare bestellt werden.

nobelbiocare.com/store

nobelbiocare.com/rescue



88566 DE 2304 Gedruckt in der EU © Nobel Biocare Services AG, 2023. Alle Rechte vorbehalten. Nobel Biocare, das Nobel Biocare Logo und alle sonstigen Marken sind, sofern nicht anderweitig angegeben oder aus dem Kontext ersichtlich, Marken von Nobel Biocare. Weitere Informationen finden Sie unter www.nobelbiocare.com/trademarks. Die Produktabbildungen sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken und sind möglicherweise keine exakte Darstellung des Produkts. Hinweis: Einige Produkte sind unter Umständen nicht in allen Märkten für den Verkauf zugelassen. Aktuelle Informationen zur Produktpalette und Verfügbarkeit erhalten Sie von Ihrer Nobel Biocare Niederlassung. Nur zur Verschreibung Achtung: Laut US-Bundesgesetzen darf dieses Produkt nur an zugelassene Behandler, medizinische Fachkräfte oder Ärzte oder auf deren Anordnung hin verkauft werden. Vollständige Informationen zur Verschreibung, einschließlich Indikationen, Gegenanzeigen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen, finden Sie in der Gebrauchsanweisung.