



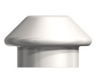
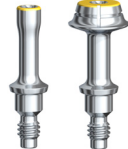


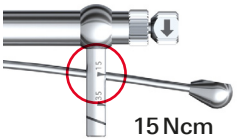












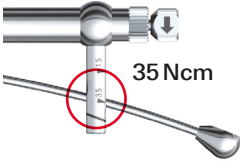


### Composants prothétiques

<p><b>Pilier provisoire en plastique</b>  <b>Chape provisoire en plastique</b>  <b>Pilier de cicatrisation</b> (y compris le pilier de cicatrisation anatomique PEEK)  <b>Capuchon de cicatrisation</b></p>						<p><b>Vissage manuel</b></p>
<p><b>Piliers de cicatrisation et provisoires Slim</b>  <b>Vis de prothèse pour prothèses d'usage</b>  <b>Chape provisoire en titane</b></p>				 <p><b>15 Ncm</b></p>		
<p><b>Pilier boule</b>  <b>Pilier Multi-unit Abutment de 17°</b>  <b>Pilier Multi-unit Abutment de 30°</b></p>						
<p><b>Piliers pour NobelActive® 3.0</b></p>  <p>max 15 Ncm</p>						
<p><b>Tous les autres piliers provisoires et définitifs pour les systèmes d'implants Nobel Biocare</b>          (y compris le pilier provisoire anatomique PEEK)</p>					 <p><b>35 Ncm</b></p>	

**Remarque :** les composants prothétiques pour les autres systèmes implantaires majeurs peuvent nécessiter différentes valeurs de couple.  
 Toujours consulter les instructions correspondantes.