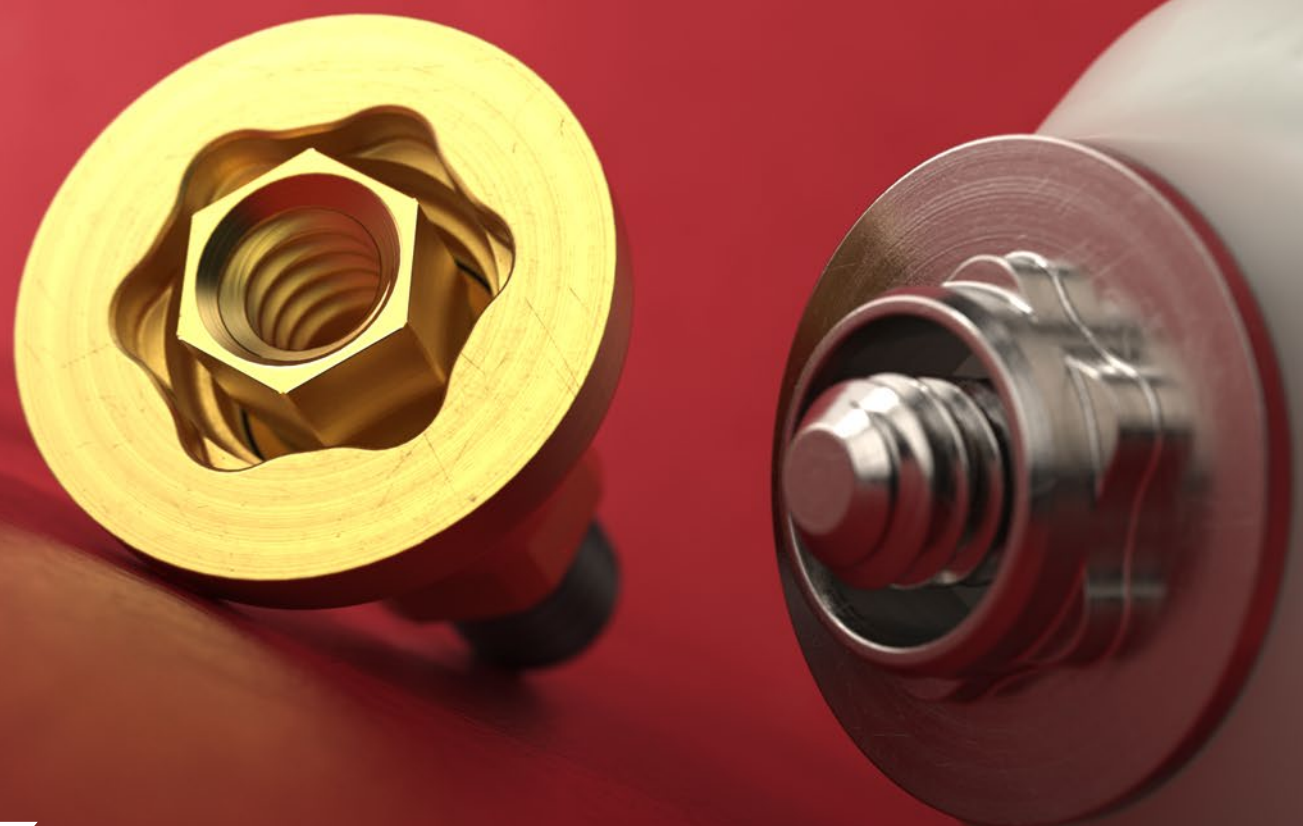


Брошюра по продукции

A close-up photograph of two dental implant components. On the left is a gold-colored hexagonal abutment with a threaded central hole. On the right is a silver-colored titanium base with a hexagonal top surface and a central screw hole. Both are set against a dark red background.

Концепция On1™

СОХРАНЯЯ
прикрепление
мягких тканей


WE FOLLOW NO
ONE.

Концепция On1™ позволяет сохранить структуру соединительных тканей, оставляя полную свободу выбора ортопедических и хирургических методик. Это упрощает ортопедический протокол благодаря переносу платформы с уровня кости на уровень мягких тканей.




Прикрепление мягких тканей всегда остается интактным

Основание On1 фиксируется на имплантате в момент его установки. Структура соединительных тканей сохраняется интактной, так как основание On1 остается на имплантате во время любых ортопедических манипуляций и на протяжении всего срока службы конструкции. Это, в свою очередь, способствует сохранению краевой кости и здорового состояния мягких тканей.

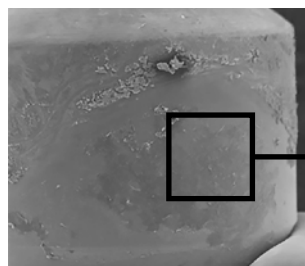

Извлеченный формирователь десны

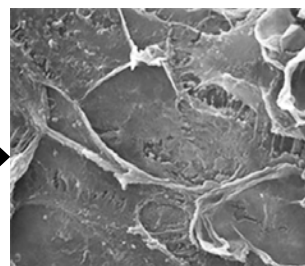

Клетки, прикрепленные к поверхности абатмента



NobelActive®
TiUltra™



NobelParallel™
CC TiUltra™



NobelReplace®
CC TiUltra™

Любой хирургический протокол

Концепция On1 может использоваться с любой системой имплантатов Nobel Biocare с коническим соединением, каждая из которых разработана для достижения высокой первичной стабилизации и имеет встроенную функцию смены платформы.

Основание On1 с Heal: революционной поверхностью для Мукоинтеграции™



Heal — первая поверхность для интеграции мягких тканей. Это гладкая, непористая, наноструктурированная анодированная поверхность с особым химическим составом и топографией, которые способствуют прикреплению мягких тканей.

[Узнайте больше о Heal на нашем сайте](#)

**«С концепцией
On1 вы получаете
лучшее —
имплантат
уровня кости
со встроенной
функцией смены
платформы и
протезирование
на уровне
мягких тканей
с сохранением
герметичности
слизистой».**


**Д-р Бернар Туати (Bernard Touati),
Франция**

Ортопедический протокол по вашему выбору

Концепция On1 позволяет применять как стандартный протокол получения оттиска, так и протокол интраорального сканирования с использованием специального заживляющего колпачка On1 IOS (интраорального сканируемого). Для облегчения работы основные компоненты поставляются в комплекте с предустановленным держателем.

Стандартный протокол

В случае стандартного протокола основание On1 остается на имплантате во время установки заживляющего колпачка, временной реставрации, оттискового трансфера и постоянной конструкции.

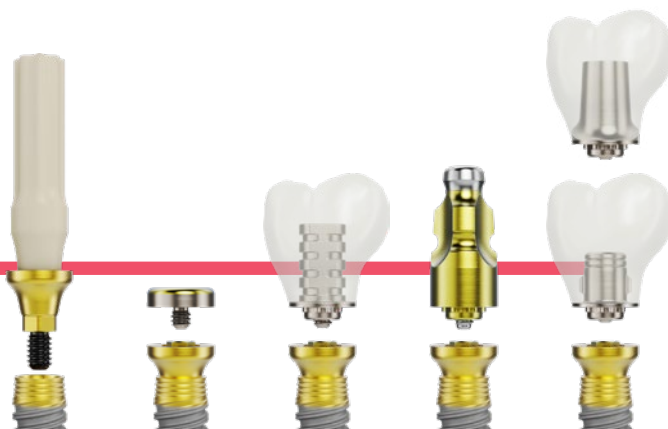


Протокол интраорального сканирования

При протоколе интраорального сканирования перед установкой постоянной конструкции используется только заживляющий колпачок IOS.



Повышение эффективности благодаря интраоральному сканированию

Значительно сократите сроки лечения с уникальным заживляющим колпачком On1 IOS для интраорального сканирования. Он позволяет исключить стандартные ортопедические манипуляции, в том числе снятие оттиска, а также служит анатомическим формирователем десны для создания оптимального контура мягких тканей.

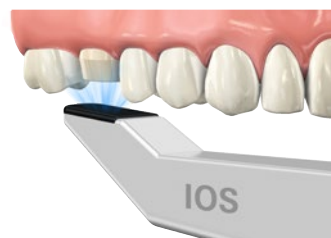

В интернет-магазине

Заказывайте любые имплантаты и стандартные ортопедические компоненты в интернет-магазине Nobel Biocare в любое время суток.

nobelbiocare.com/store

По телефону

Позвоните в наш отдел по работе с клиентами или свяжитесь с представителем по продажам.

nobelbiocare.com/contact

Пожизненная гарантия

Пожизненная гарантия на все имплантаты Nobel Biocare, а также стандартные ортопедические компоненты.

nobelbiocare.com/warranty



nobelbiocare.com/on1



87424 RU 2105 Отпечатано в ЕС © Nobel Biocare Services AG, 2021. Все права защищены. Nobel Biocare, логотип Nobel Biocare и все остальные товарные знаки являются товарными знаками компании Nobel Biocare, если иное не указано явно или не следует очевидно из контекста. Дополнительную информацию вы можете найти на сайте nobelbiocare.com/trademarks. Изображения приведены без учета масштаба. Изображения продукции приведены исключительно в целях иллюстрации и могут не точно соответствовать реальной продукции.

Отказ от ответственности: часть продукции может быть разрешена к применению или представлена для продажи не во всех странах. Для получения информации о текущем ассортименте продукции и ее наличии обратитесь в представительство Nobel Biocare. Применять только по назначению врача. Внимание! В соответствии с федеральным законодательством США продажа данного компонента разрешена только лицензированным клиницистам, медицинским работникам и врачам или по их заказу. Указания о применении продукции, в том числе показания, противопоказания, предупреждения и предостережения см. в инструкции по применению.