



N1インプラント・外科手順

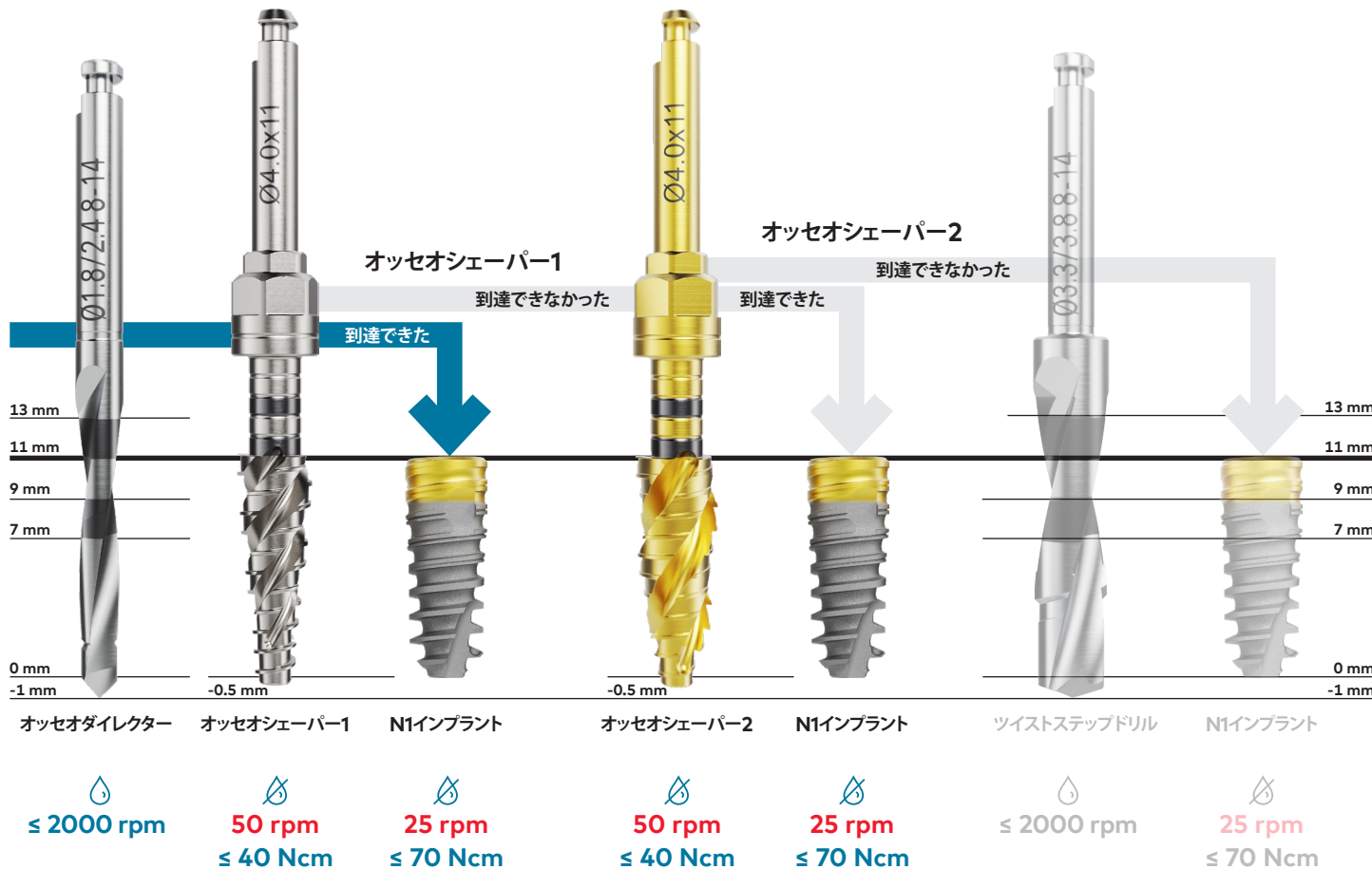

平らな面を唇側側へ向けて埋入します。

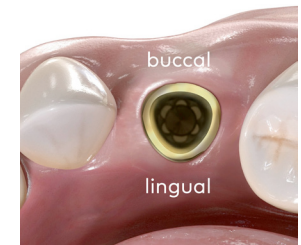

インプラントドライバーの窪みをインプラント接合部の平らな面と合わせて装着します。



上記赤字で書かれた回転速度(rpm)は指定速度となります。ドリルユニットを正しく設定してご使用ください。
(指定の回転速度に設定できないドリルユニットのご使用はお控えください。)

注水あり

注水なし

N1インプラント・システム

締め付けトルク値



ノーベルバイオケア N1ベース

20 Ncm



N1ベース・ドライバー

ヒーリング & 印象用コンポーネント

手締め



オムニグリップミニ・ドライバー

テンポラリー & 最終アバットメント/シリンダー

20 Ncm



オムニグリップミニ・ドライバー

ストレート・マルチユニット・
アバットメント

20 Ncm



マルチユニット用ドライバー

N1ベース
レベル



N1インプラント
レベル



マルチユニット・
アバットメント
レベル



角度付きマルチユニット・
アバットメント



ストレート・マルチユニット・
アバットメント

* マルチユニット・アバットメント上に装着する上部構造の締め付けトルクは15Ncmです。
補綴装置の種類に応じてスクリューが異なり、ドライバーもスクリューに応じたものをご使用ください。