

Cinque anni di eccellenza estetica con NobelReplace® CC e NobelProcera® nella mascella anteriore



Rilevanza clinica

Stabilità ossea a lungo termine


Livelli dell'osso marginale stabili dal rimodellamento iniziale al follow-up a 5 anni

Tessuti molli sani

La salute dei tessuti molli è migliorata in modo significativo dall'intervento al posizionamento della protesi ed è sempre rimasta stabile

Elevata soddisfazione del paziente in termini funzionali ed estetici


Miglioramento continuo della qualità di vita correlata alla salute orale.

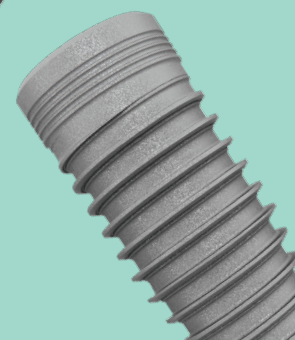

Immediately provisionalized tapered conical connection implants for single-tooth restorations in the maxillary esthetic zone: a 5-year prospective single-cohort multicenter analysis. **Baer RA, Nölken R, Colic S, Heydecke G, Mirzakhani C, Behneke A, Behneke N, Gottesman E, Ottria L, Pozzi A, Fögl A, Zechner W.** *Clinical Oral Investigations*. 2022;26(4):3593-604.

I risultati

- Livelli dell'osso marginale stabili, con un rimodellamento medio di $-0,80 \pm 1,13$ mm dall'inserimento a **5 anni**.

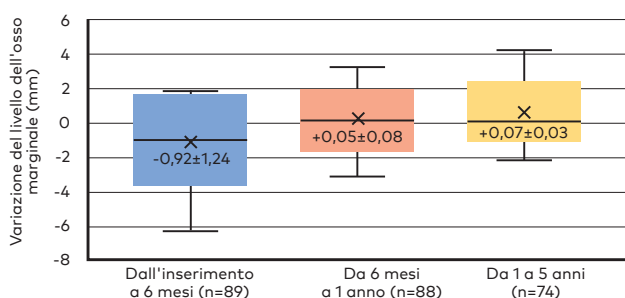

- Elevato tasso di sopravvivenza dell'impianto a 5 anni del **97,8%**.
- Rigenerazione completa o di oltre la metà dell'altezza della papilla nel 90,1% dei siti a 5 anni.
- Sanguinamento del solco gengivale minimo o assente nel 98,8% dei siti e ridotto accumulo di placca nel 93,8% dei siti a 5 anni.
- Elevato valore di estetica rosa >9,1 alle visite di follow-up da 1 a 5 anni.
- Elevata soddisfazione dei pazienti in termini funzionali ed estetici, con un tasso medio di reclami (OHIP-14) di 0,84 su una scala da 0 a 14 a 5 anni.

Disegno dello studio

Prospettico, multicentrico, a coorte singola



94 pazienti



Dente singolo
Mascella anteriore
Inserimento immediato del provvisorio



99 NobelReplace CC




78 corone singole NobelProcera + ulteriori 18



Follow-up a 5 anni

Esempio di un caso clinico dallo studio

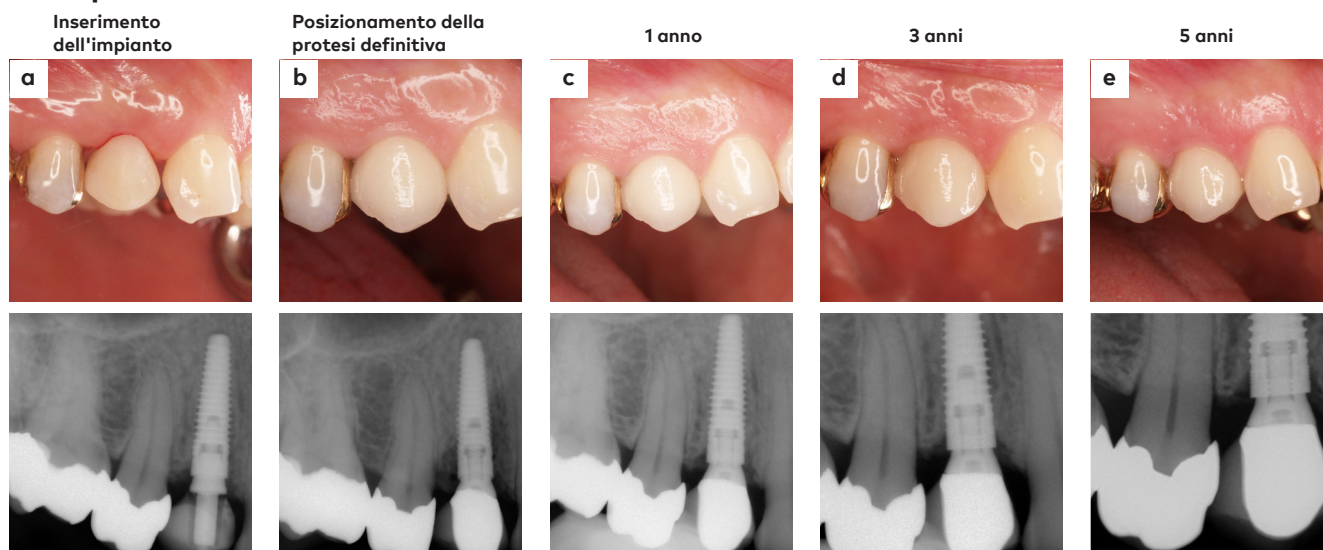

Immagini per gentile concessione dei Dott. Alexandra e Nicolaus Behneke, Germania

Paziente di sesso femminile di 45 anni di età, senza periodontite pregressa, in cui è stato impiantato NobelReplace CC 3,5 x 13 mm nel sito del primo premolare, posizione FDI 14 (a). La qualità dell'osso era compatta (tipo 2) e il torque di inserimento finale è stato di 45 Ncm. L'impianto è stato immediatamente dotato di provvisorio. Le immagini cliniche e le radiografie acquisite al momento del posizionamento finale della protesi, così come al follow-up a 1, 3 e 5 anni (b-e) mostrano risposte sane dei tessuti duri e molli, associate a un visibile miglioramento estetico.

Conclusione degli autori

"Gli elevati tassi di successo di impianti NobelReplace CC con posizionamento immediato del provvisorio nella zona estetica, uniti alla buona salute dei tessuti peri-implantari, sono stati associati a un miglioramento continuo della qualità di vita correlata alla salute orale dei pazienti."

Ulteriori approfondimenti



Disponibile su
PubMed



FOR. Interface
precision in conical
connection implants



[nobelbiocare.com/it-it/
nobelreplace-conical-connection](https://nobelbiocare.com/it-it/nobelreplace-conical-connection)

GMT83339 IT 2302 © Nobel Biocare Services AG, 2023. Tutti i diritti riservati. Nobel Biocare, il logo Nobel Biocare e tutti gli altri marchi di fabbrica sono, salvo diversa dichiarazione o evidenza dal contesto in un caso specifico, marchi di fabbrica di Nobel Biocare. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al sito nobelbiocare.com/trademarks. Le immagini dei prodotti non sono necessariamente in scala. Tutte le immagini dei prodotti hanno finalità puramente illustrative e possono non essere la rappresentazione esatta del prodotto. Esclusione di responsabilità: alcuni prodotti possono non avere l'approvazione o l'autorizzazione alla vendita da parte degli enti normativi in tutti i mercati. Rivolgersi all'ufficio vendite locale di Nobel Biocare per informazioni sulla gamma dei prodotti esistenti e la loro disponibilità. Per le informazioni complete relative alle prescrizioni, tra cui indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni, consultare le Istruzioni per l'uso.

**Nobel
Biocare™**