


# PureSet™

ピュアセット

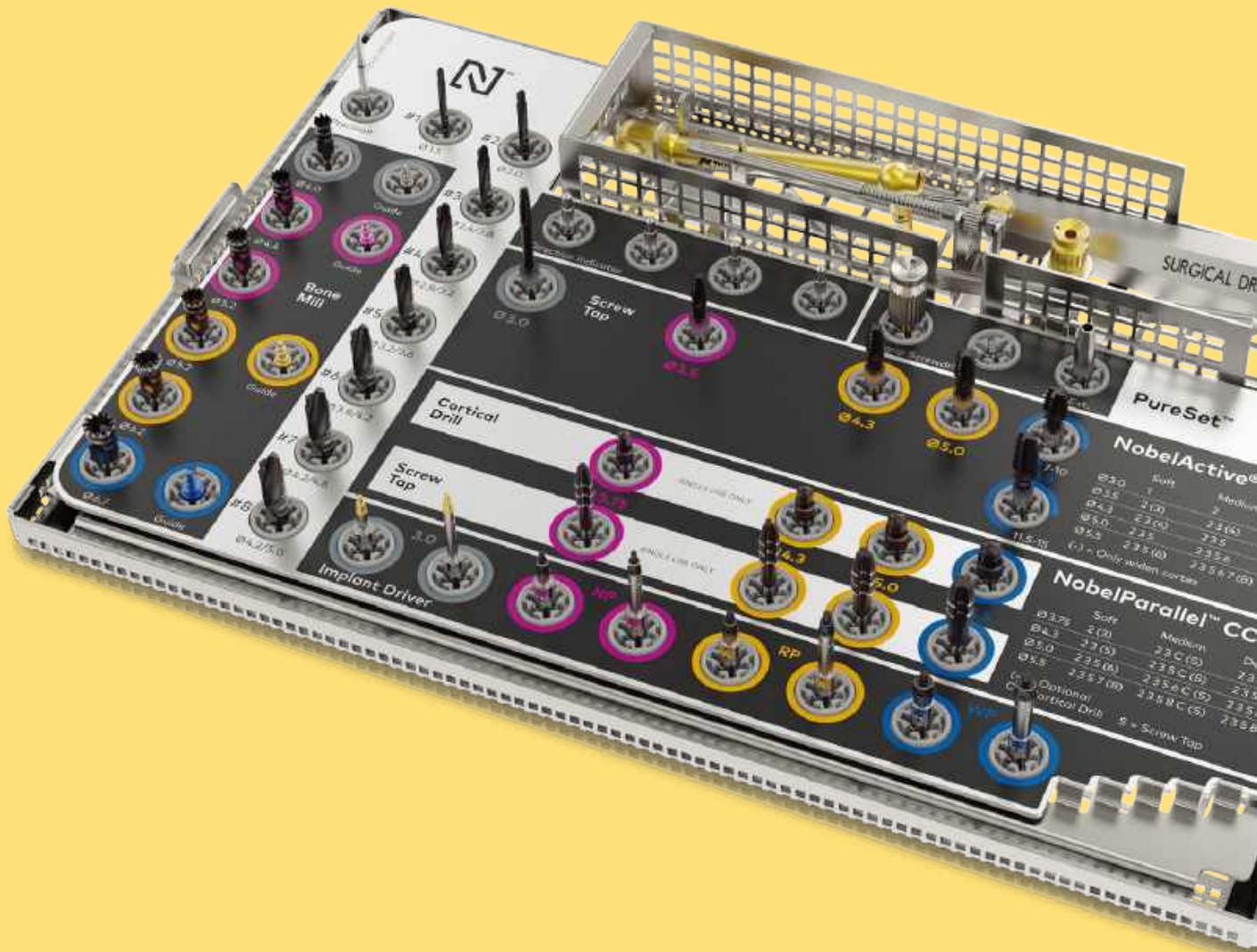


# ウォッシャー・ディスインフェクター（自動洗浄器）対応の デザイン設計

**ピュアセット** は、ウォッシャー・ディスインフェクター（自動洗浄器）に対応しており、強度の高いステンレス・スチール製のため、衛生的かつ効率的にご利用いただけます。日々の洗浄・滅菌処理に伴う煩雑な手順を簡便にし、安心・安全な診療を患者様に提供します。



## 追及された衛生管理

ステンレススチール製のピュアセットトレーは、手作業を減らす自動洗浄可能なデザイン<sup>1</sup>

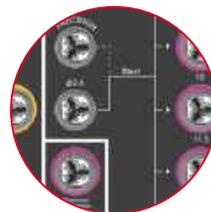

## シンプルで直感的なレイアウト

手術フローを考慮したレイアウトと、パーツの識別を簡便化するデザインで作業効率をアップ



## 機能性の高い保持機構

安定してドリルを保持するだけでなく、洗浄滅菌時、その効果を阻害しません。

## 削減された手動ステップ数<sup>2</sup>

インスツルメントを所定の位置から取り外すことなく、トレーと一緒に自動洗浄・乾燥・滅菌工程を行え<sup>3</sup>、大幅に時間を節約


1 ピュアセットトレーは、ピュアセットプレートとグロメットを除き、ステンレススチール製です。

2 ノーベルバイオケア比

3 一部のインスツルメントやドリルは手洗浄が必要になります。詳細は P.21 に記載の推奨洗浄方法をご覧ください。

# 使いやすく衛生的かつ効率的なピュアセット

以下、ウォッシャー・ディスインフェクター使用時の手順となります。

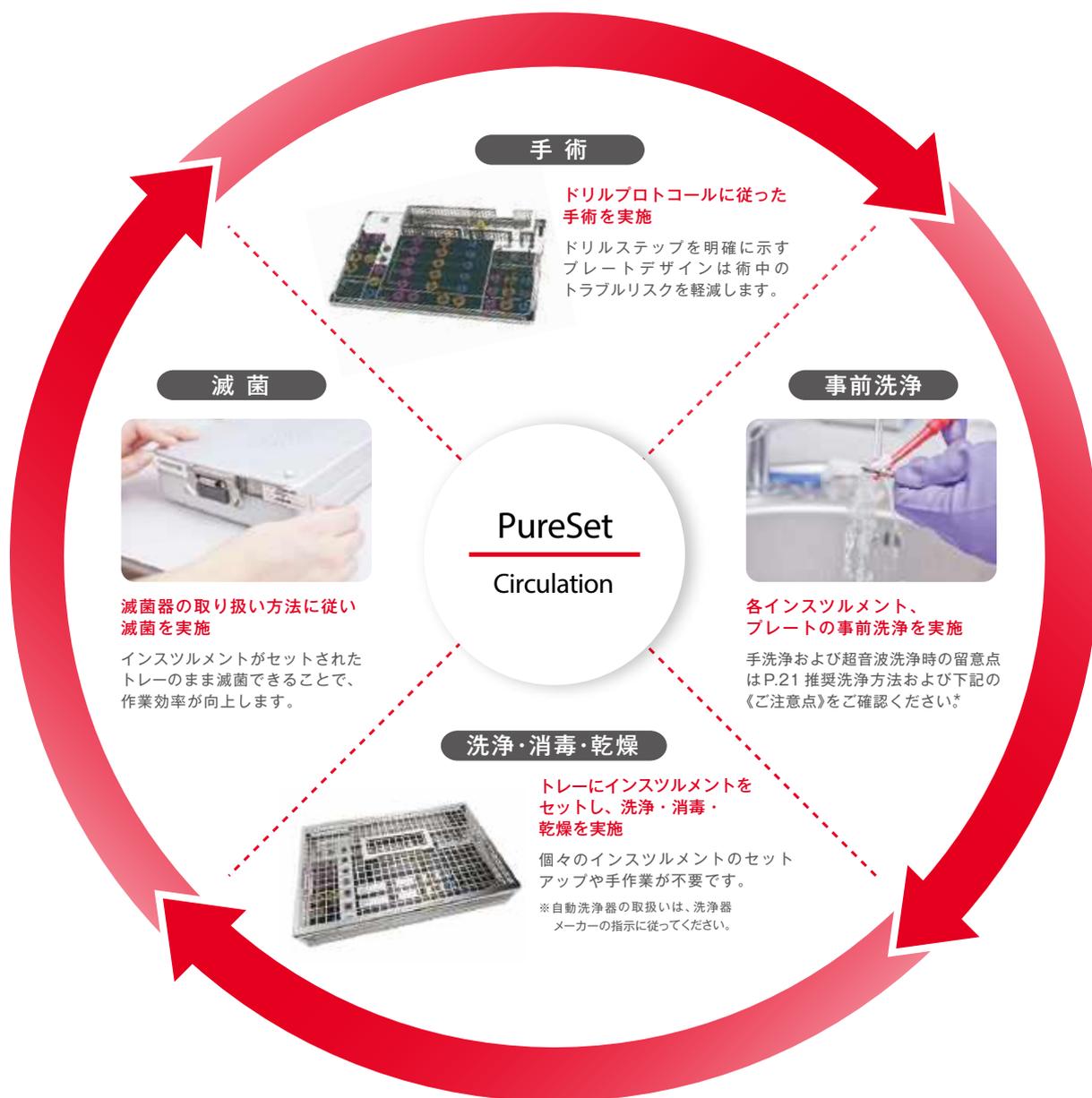


## 《ご注意点》

- ・ プレートの超音波洗浄はできません。
- ・ 推奨のpH8.5~11以外の洗浄液を使用すると、プレートが損傷する可能性があります。
- ・ ウォッシャー・ディスインフェクター(自動洗浄器)使用時は、トレーからプレートを取り外して別々に洗浄・消毒・乾燥を実施します。
- ・ 滅菌後のピュアセット・トレーは高温多湿、直射日光を避け、常温で清潔な場所に保管してください。

# NB N1 ピュアセット

Freehand  
SURGERY

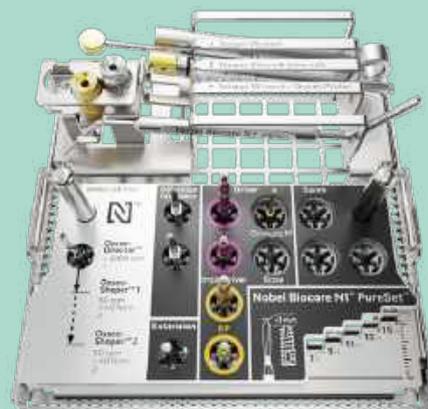

W122.1 × D115 × H45.6 (mm)

## NB N1 ピュアセット

#87293

セットに含まれるもの (単品でのご購入も可能です)

PUR0400	NB N1 ピュアセットトレイ
300905	インプラントドライバー NB N1 TCC NP ショート
300906	インプラントドライバー NB N1 TCC NP ロング
300907	インプラントドライバー NB N1 TCC RP ショート
300908	インプラントドライバー NB N1 TCC RP ロング
301083	外科用トルクレンチ NB N1*
29161	ハンドル・マシンインストルメント用

300853	マシン用ドライバー・オムニグリップミニ 28mm
300903	マシン用ドライバー NB N1 ベース 28mm
300923	オッセオシェーバー・エクステンション NB N1
300918	方向指示棒 NB N1 (セットには2本入り)
300924	デブスプローブ NB N1
301074	ラジオグラフィックテンプレート NB N1
301075	ウォールチャート NB N1 ピュアセット

セットに含まれていないもの (必要に応じてご購入ください)


オッセオダイレクター	8-14 mm	8-18 mm
Ø 1.8-2.4	301077	301401



	オッセオシェーバー 2		
	NP 3.5	RP 4.0	RP 4.8
	3.5 mm	4.0 mm	4.8 mm
7 mm	-	300895	300899
9 mm	300892	300896	300900
11 mm	300893	300897	300901
13 mm	300894	300898	-
15 mm	301178	301179	-



\* トルクレンチはパーツを個別に分解して洗浄します。なお、外科用トルクレンチには、トルクレンチアダプターが含まれます。  
N1 外科用トルクレンチ付属のアダプターの単品販売はございませんが、リプレイス外科用トルクレンチアダプター (No.28840) を代替としてご使用いただけます。

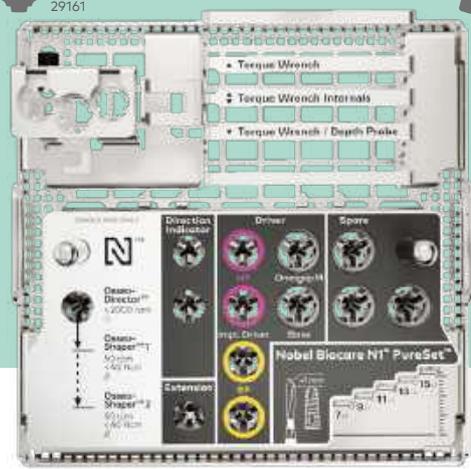

セットに含まれていないもの(必要に応じてご購入ください)

ツイストステップドリル		
Ø 2.5/3.4	8-14mm	301078
	8-18mm	301421
Ø 3.3/3.8	8-14mm	301079
	8-18mm	301422
Ø 4.2/4.4	8-18mm	301080



ボーンミル NB N1 TCC*	
Ø 4.0	300909
Ø 5.2	300910



\* ボーンミルガイドは付属しておりません。別途ご購入ください。

ドリル	
36118	プレジジョンドリル
35426	ガイドドリル



ボーンミルガイド NB N1 TCC	
<b>NP Ø 4.0</b>	300911
<b>NP Ø 5.2</b>	300915
<b>RP Ø 5.2</b>	300916



ガイドッド・サージェリー用ドリル

ガイドッド・パイロットドリル		
Ø 2.0	(10+) 8-14 mm	(10+) 8-18 mm
	301081	301402




ガイドッド・パイロットドリルは、サージカルテンプレートを装着し、使用するドリルです。なお、ガイドッド・ドリルストップをご使用いただけます。

# ノーベルアクティブ ピュアセット

# ノーベルパラレル CC ピュアセット

Freehand  
SURGERY

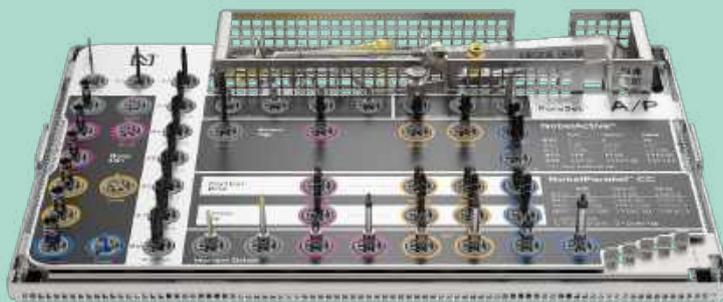

W276.1 × D176 × H47 (mm)

## ノーベルアクティブ・ピュアセット

#87294

セットに含まれるもの(単品でのご購入も可能です)

PURO200	ノーベルアクティブ/ノーベルパラレル CC・ピュアセット・トレイ
34584	外科用トルクレンチ・ノーベルアクティブ*
32180	サージカルドライバー
32112	方向指示棒 Ø 2 / Ø 2.4 - 2.8 mm (セットには4本入り)
37791	デブスプローブ 7-18 mm Z シェイプ
29149	手用ドライバー ユニグリップ 28 mm
KI589B.204.	ドリルエクステンションシャフト ブラッセラー
300352	インプラントオーガナイザー
37887	ノーベルアクティブ X線診断用テンプレート
300781	ノーベルアクティブ/ノーベルパラレル CC・ピュアセット・ウォールチャート

### インプラントドライバー・CC

	3.0	NP	RP	WP
28 mm	36773	36718	36720	37859
37 mm	36774	36719	36721	37860



## ノーベルパラレルCC・ピュアセット

#87295

PURO200	ノーベルアクティブ/ノーベルパラレル CC・ピュアセット・トレイ
28839	外科用トルクレンチ・リプレイス*
32112	方向指示棒 Ø 2 / Ø 2.4 - 2.8 mm (セットには4本入り)
37791	デブスプローブ 7-18 mm Z シェイプ
29149	手用ドライバー ユニグリップ 28 mm
KI589B.204.	ドリルエクステンションシャフト ブラッセラー
300352	インプラントオーガナイザー
37792	ノーベルパラレル CC X線診断用テンプレート
300781	ノーベルアクティブ/ノーベルパラレル CC・ピュアセット・ウォールチャート


### インプラントドライバー・CC

	NP	RP	WP
28 mm	36718	36720	37859
37 mm	36719	36721	37860



\*トルクレンチはパーツを個別に分解して洗浄します。

ノーベルアクティブ用とノーベルパラレル CC用の外科用インスツルメントが1つのトレイ(No. PURO200)に格納できます。  
既にノーベルアクティブ外科用キットまたはノーベルパラレル CC外科用キットをお持ちのお客様は、上記赤手の製品を追加購入いただけますと、  
ノーベルアクティブ・ピュアセットまたはノーベルパラレル CC・ピュアセット一式となります。

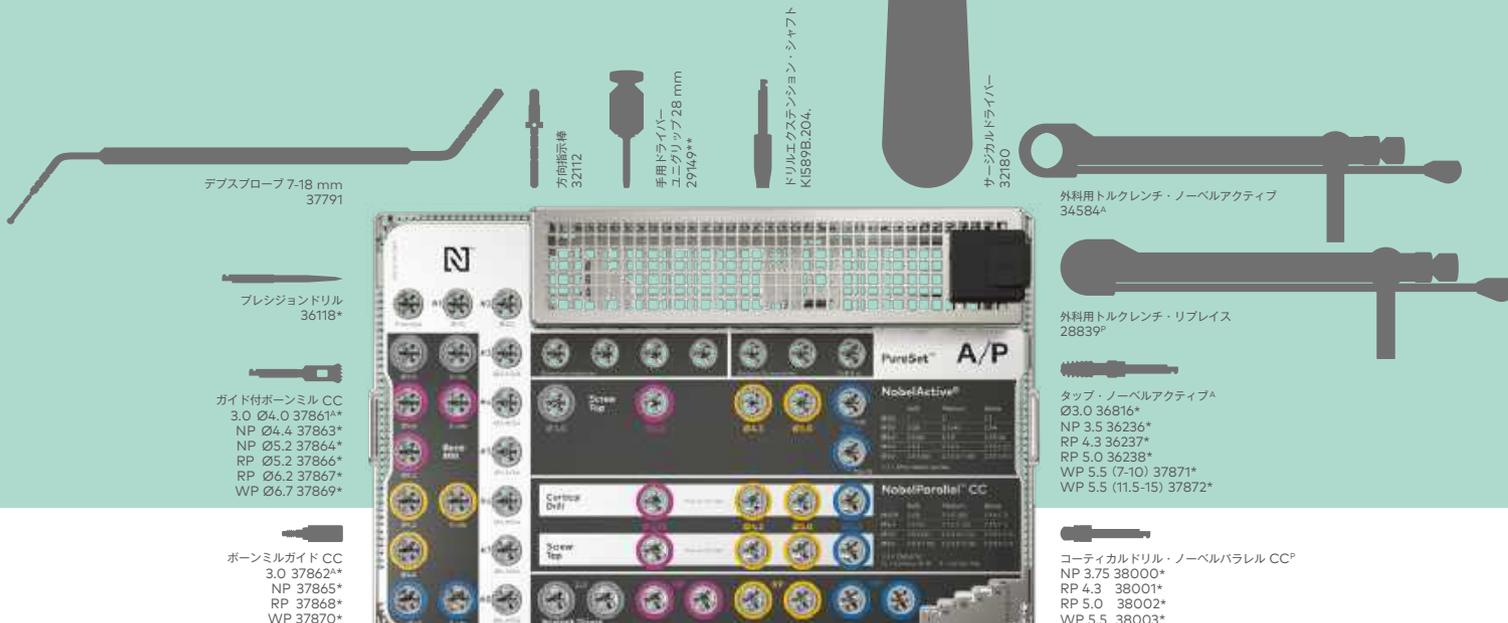

デブスプローブ 7-18 mm  
37791

方向指示棒  
32112

手用ドライバ  
ユニグリップ 28 mm  
29749\*\*

ドリルエグゼクティブ  
K1589B.204,  
シャフト

サージカルドライバ  
32180


外科用トルクレンチ・ノーベルアクティブ  
34584<sup>A</sup>

外科用トルクレンチ・リプレイス  
28839<sup>P</sup>

タップ・ノーベルアクティブ<sup>A</sup>  
Ø3.0 36816\*  
NP 3.5 36236\*  
RP 4.3 36237\*  
WP 5.0 36238\*  
WP 5.5 (7-10) 37871\*  
WP 5.5 (11.5-15) 37872\*

コーティカルドリル・ノーベルパラレル CC<sup>P</sup>  
NP 3.75 38000\*  
RP 4.3 38001\*  
WP 5.0 38002\*  
WP 5.5 38003\*

タップ・ノーベルパラレル CC<sup>P</sup>  
NP 3.75 (7-13) 37990\*  
NP 3.75 (7-18) 37991\*  
RP 4.3 (7-13) 37992\*  
RP 4.3 (7-18) 37993\*  
RP 5.0 (7-13) 37994\*  
RP 5.0 (7-18) 37995\*  
WP 5.5 (7-10) 37996\*  
WP 5.5 (7-15) 37997\*

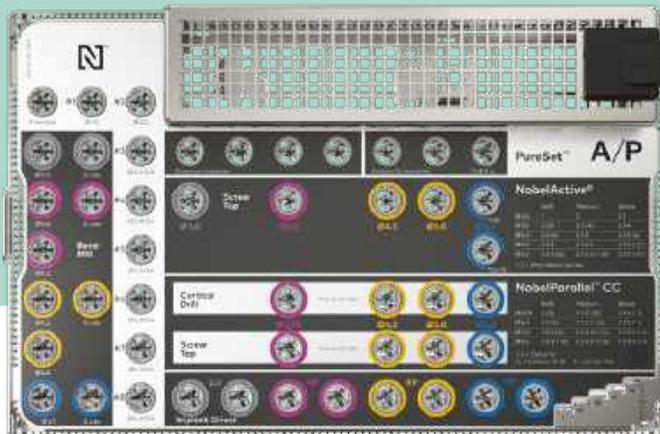

プレジジョンドリル  
36118\*

ガイド付ボーンミル CC  
3.0 Ø4.0 37861A\*  
NP Ø4.4 37863\*  
NP Ø5.2 37864\*  
RP Ø5.2 37866\*  
RP Ø6.2 37867\*  
WP Ø6.7 37869\*

ボーンミルガイド CC  
3.0 37862A\*  
NP 37865\*  
RP 37868\*  
WP 37870\*

ツイストドリル  
Ø1.5 31278\*\*  
Ø2 32297\*

ツイストステップドリル  
Ø2.4/2.8 mm 32261\*  
Ø2.8/3.2 mm 34638\*  
Ø3.2/3.6 mm 32264\*  
Ø3.8/4.2 mm 32276\*  
Ø4.2/4.6 mm 34582\*  
Ø4.2/5.0 mm 37876\*

インフランチドライバ  
3.0  
28 mm 36773\*  
37 mm 36774\*

インフランチドライバ  
NP  
28 mm 36718  
37 mm 36719

インフランチドライバ  
RP  
28 mm 36720  
37 mm 36721

インフランチドライバ  
WP  
28 mm 37859  
37 mm 37860

\*セットには含まれておりません。必要に応じて別途ご購入をお願いします。 \*\* 他の長さのスクレイドライバーのご用意もございます。

セットに含まれていないもの(必要に応じてご購入ください)

タップ・ノーベルアクティブ				
	3.0	NP	RP	WP
Ø 3.0	36816			
Ø 3.5		36236		
Ø 4.3			36237	
Ø 5.0			36238	
Ø 5.5				37871 (7-10 mm) 37872 (11.5-15mm)



タップ・ノーベルパラレル CC				
	NP	RP	WP	
Ø 3.75	37990 (7-13 mm) 37991 (7-18 mm)			
Ø 4.3		37992 (7-13 mm) 37993 (7-18 mm)		
Ø 5.0		37994 (7-13 mm) 37995 (7-18 mm)		
Ø 5.5				37996 (7-10 mm) 37997 (7-15 mm)



ドリル	
36118	プレジジョンドリル
35426	ガイドドリル



ツイストドリル (Ø 2mmはチップ付)			
Ø 1.5	31278 (7-15 mm) <sup>A</sup>		
Ø 2.0	32296 (7-10 mm)	32297 (7-15 mm)	32299 (10-18 mm)



ツイストステップドリル			
Ø 2.4/2.8	32260 (7-10 mm)	32261 (7-15 mm)	32262 (10-18 mm)
Ø 2.8/3.2	37873 (7-10 mm)	34638 (7-15 mm)	34639 (10-18 mm)
Ø 3.2/3.6	32263 (7-10 mm)	32264 (7-15 mm)	32265 (10-18 mm)
Ø 3.8/4.2	32275 (7-10 mm)	32276 (7-15 mm)	32277 (10-18 mm)
Ø 4.2/4.6	37874 (7-10 mm)	34582 (7-15 mm)	34583 (10-18 mm)
Ø 4.2/5.0	37875 (7-10 mm)	37876 (7-15 mm)	



コーティカルドリル・ノーベルパラレル CC				
	NP	RP	WP	
Ø 3.75	38000			
Ø 4.3		38001		
Ø 5.0		38002		
Ø 5.5				38003



ガイド付ボーンミル CC				
	3.0	NP	RP	WP
Ø 4.0	37861 <sup>A</sup>			
Ø 4.4		37863		
Ø 5.2		37864	37866	
Ø 6.2			37867	
Ø 6.7				37869



ボーンミルガイド CC				
3.0	NP	RP	WP	
37862 <sup>A</sup>	37865	37868	37870	




ドリルストップ・キット	
87303	



# ノーベルテーパード CC ピュアセット

Freehand  
SURGERY

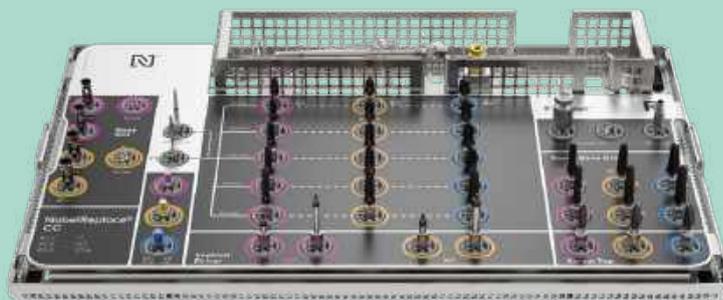

W276.1 × D176 × H47 (mm)

## ノーベルテーパード CC・ピュアセット

#87296

セットに含まれるもの(単品でのご購入も可能です)

<b>PUR0300</b>	ノーベルテーパード CC・ピュアセット・トレイ
28839	外科用トルクレンチ・リブレイス*
29149	手持ドライバー ユニグリップ 28 mm
KI589B.204.	ドリルエクステンションシャフト ブラッセラー
300352	インプラントオーガナイザー
2042	ゲージニードル
37320	ノーベルリブレイス・テーパード X線診断用テンプレート
<b>300567</b>	ノーベルテーパードCC・ピュアセット・ウォールチャート

\*トルクレンチはパーツを個別に分解して洗浄します。

デンスボードドリル・テーパード			
	NP	RP	WP
Ø 3.5	29377 (13 mm) 29378 (16 mm)		
Ø 4.3		29380 (13 mm) 29381 (16 mm)	
Ø 5.0			29383 (13 mm) 29384 (16 mm)



テーパードドリル			
	NP	RP	WP
Ø 3.5	32075 (8 mm) 29367 (10 mm) 36113 (11.5 mm) 29368 (13 mm) 29369 (16 mm)		
Ø 4.3		32076 (8 mm) 29370 (10 mm) 36114 (11.5 mm) 29371 (13 mm) 29372 (16 mm)	
Ø 5.0			32077 (8 mm) 29373 (10 mm) 36115 (11.5 mm) 29374 (13 mm) 29375 (16 mm)




方向指示棒・テーパード			タップ・テーパード		
NP	RP	WP	NP	RP	WP
32255	32256	32257	36717	32090	32091



インプラントドライバー・CC		
	NP	RP
28 mm	36718	36720
37 mm	36719	36721



既にノーベルテーパード CC 外科用キットをお持ちのお客様は、上記赤字の製品を追加購入いただけますと、ノーベルテーパード CC・ピュアセット一式となります。  
 一セットにはΦ 3.5、Φ 4.3、Φ 5.0mmのインプラントに必要なインスツルメントが含まれます。  
 一こちらのセットはノーベルテーパード CC (PMC 含む) に対応します。

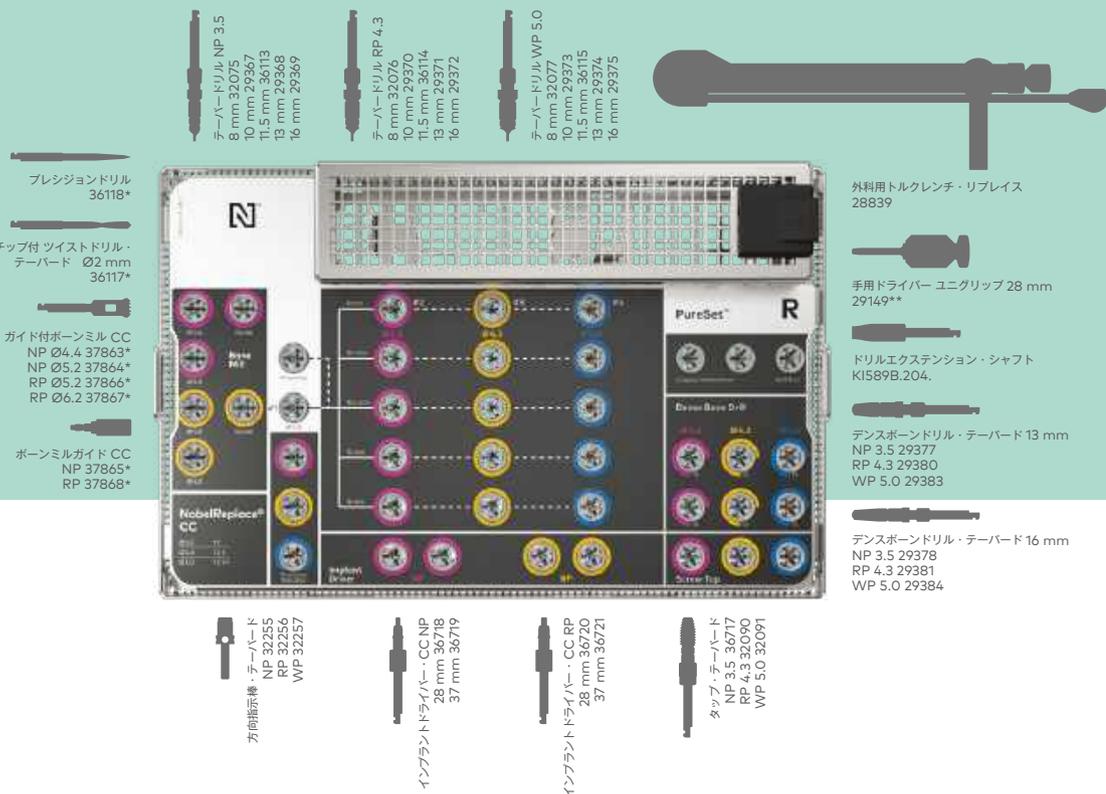

テーパードリル NP 3.5  
8 mm 32075  
10 mm 29377  
11.5 mm 36113  
13 mm 29368  
16 mm 29369

テーパードリル RP 4.3  
8 mm 32076  
10 mm 29370  
11.5 mm 36114  
13 mm 29371  
16 mm 29372

テーパードリル WP 5.0  
8 mm 32077  
10 mm 29373  
11.5 mm 36115  
13 mm 29374  
16 mm 29375

プレジジョンドリル  
36118\*

チップ付 ツイストドリル・  
テーパード Ø2 mm  
36117\*

ガイド付ボーンミル CC  
NP Ø4.4 37863\*  
NP Ø5.2 37864\*  
RP Ø5.2 37866\*  
RP Ø6.2 37867\*

ボーンミルガイド CC  
NP 37865\*  
RP 37868\*

外科用トルクレンチ・リプレイス  
28839

手用ドライバー ユニクリップ 28 mm  
29149\*\*

ドリルエクステンション・シャフト  
K1589B.204.

デンスボンドリル・テーパード 13 mm  
NP 3.5 29377  
RP 4.3 29380  
WP 5.0 29383

デンスボンドリル・テーパード 16 mm  
NP 3.5 29378  
RP 4.3 29381  
WP 5.0 29384

方向指示棒・テーパード  
NP 32255  
RP 32256  
WP 32257

インプラントドライバー・CC NP  
28 mm 36718  
37 mm 36719

インプラントドライバー・CC RP  
28 mm 36720  
37 mm 36721

タップ・テーパード  
NP 3.5 36717  
RP 4.3 32090  
WP 5.0 32091

\*セットには含まれておりません。必要に応じて別途ご購入をお願いします。 \*\* 他の長さのスクレュードライバーのご用意もございます。

セットに含まれていないもの(必要に応じてご購入ください)


ガイド付ボーンミル CC		
	NP	RP
Ø 4.4	37863	
Ø 5.2	37864	37866
Ø 6.2		37867



ボーンミルガイド CC		
	NP	RP
	37865	37868




ドリル	
36118	プレジジョンドリル
35426	ガイドドリル
36117	チップ付ツイストドリル・テーパード Ø2 mm

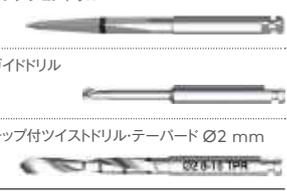

# ブローネマルクシステム ピュアセット

## ノーベルスピーディー・ グルービー ピュアセット

Freehand  
SURGERY

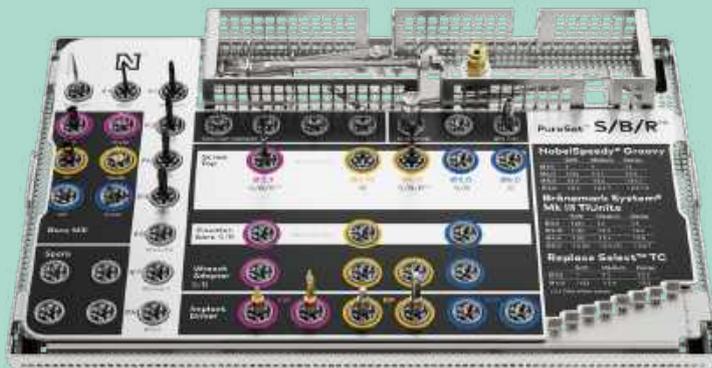

W276.1 × D176 × H47 (mm)

### ブローネマルクシステム・ピュアセット #87298

セットに含まれるもの (単品でのご購入も可能です)

PUR0900	ノーベルスピーディー・グルービー/ ブローネマルクシステム/RepSel TC・ピュアセット・トレイ
32110	外科用トルクレンチ・ブローネマルクシステム*
29132	インプラントドライバー・レンチアダプター Bmk RP 12mm
32112	方向指示棒 Ø 2 / Ø 2.4 - 2.8 mm (セットには4本入り)
37791	デブスプローブ 7-18 mm Z シェイプ
29149	手用ドライバー ユニグリップ 28 mm
DIB 097-0	Bmk カバースクリュードライバー・ヘキサゴン
KI589B.204	ドリルエクステンションシャフト ブラッセラ
300352	インプラントオーガナイザー
33097	ノーベルスピーディー・グルービー/ ブローネマルクシステム X線診断用テンプレート
301381	ノーベルスピーディー・グルービー/ ブローネマルクシステム・ピュアセット・ウォールチャート

#### インプラントドライバー・Bmk

	RP
21 mm	29129
26 mm	29130



セットに含まれていないもの (必要に応じてご購入ください)

#### インプラントドライバー・Bmk

	RP
34 mm	29131



#### インプラントドライバー・レンチアダプター・Bmk

	RP
21 mm	29133



\* トルクレンチはパーツを個別に分解して洗浄します。

ブローネマルクシステム用とノーベルスピーディー・グルービー用の外科用インスツルメントが1つのトレイ (No. PUR0900) に格納できます。  
既にブローネマルクシステム外科用キットまたはノーベルスピーディー・グルービー外科用キットをお持ちのお客様は、上記赤字の製品を追加購入いただけますと、ブローネマルクシステム・ピュアセットまたはノーベルスピーディー・グルービー・ピュアセット一式となります。

### ノーベルスピーディー・グルービー・ ピュアセット #87297

PUR0900	ノーベルスピーディー・グルービー/ ブローネマルクシステム/RepSel TC・ピュアセット・トレイ
32110	外科用トルクレンチ・ブローネマルクシステム*
29128	インプラントドライバー・レンチアダプター Bmk NP 21mm
29132	インプラントドライバー・レンチアダプター Bmk RP 12mm
29136	インプラントドライバー・レンチアダプター Bmk WP 12mm
32112	方向指示棒 Ø 2 / Ø 2.4 - 2.8 mm (セットには4本入り)
37791	デブスプローブ 7-18 mm Z シェイプ
29149	手用ドライバー ユニグリップ 28 mm
DIB 097-0	Bmk カバースクリュードライバー・ヘキサゴン
KI589B.204	ドリルエクステンションシャフト ブラッセラ
300352	インプラントオーガナイザー
37628	ノーベルスピーディー・グルービー/ ブローネマルクシステム X線診断用テンプレート
301381	ノーベルスピーディー・グルービー/ ブローネマルクシステム・ピュアセット・ウォールチャート

#### インプラントドライバー・Bmk


	NP	RP	WP
21 mm	—	29129	29134
26 mm	29126	29130	29135
34 mm	29127	—	—



#### ノーベルスピーディー デブスプローブ

18-25mm	37692
---------	-------



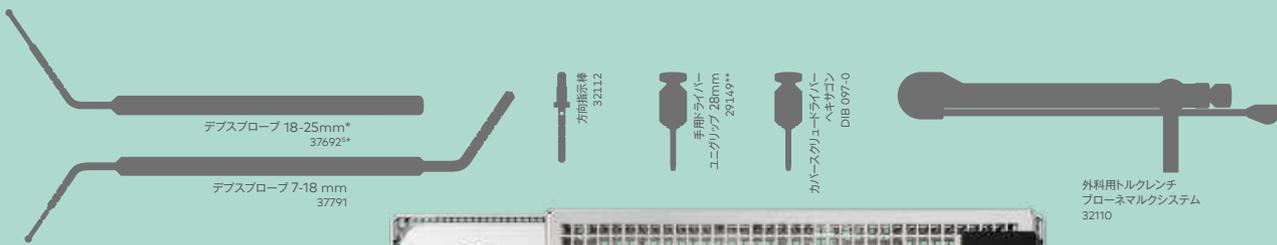

デブスプローブ 18-25mm\*  
376925\*

デブスプローブ 7-18 mm  
37791

プレジジョンドリル  
36118\*

ガイド付ボーンミル Bmk\*  
NP Ø4.5 33392  
RP Ø5.1 33393  
WP Ø6.5 33495

ボーンミルガイド Bmk\*  
NP 33496  
RP 33497  
WP 33498

方向指示棒  
32112

手用ドライバー  
ユニクリップ 28mm  
29149\*\*


カバースクリュードライバー  
ヘキサゴン  
DIB 097-0

外科用トルクレンチ  
ブローネマルクシステム  
32110

カウンターポア・Bmk\*  
NP 32281  
RP 32283  
WP 32285

ドリルエクステンションシャフト  
K1589B.204.

タップ\*  
NP Ø3.3 7-15mm 37627  
RP Ø3.75 7-13mm 32290<sup>®</sup>  
RP Ø3.75 7-18mm 32291<sup>®</sup>  
RP Ø4 7-13mm 33072  
RP Ø4 7-18mm 33073  
WP Ø5 7-13mm 32292  
WP Ø5 7-18mm 32293  
WP Ø6 7-13mm 32294<sup>®</sup>  
WP Ø6 7-18mm 32295<sup>®</sup>

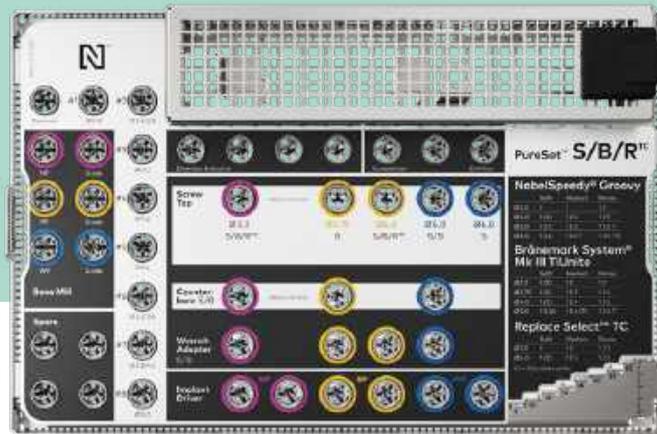

ツイストドリル\*  
ツイストステップドリル\*  
7-10 mm  
Ø 2.4/2.8 32260  
Ø 3 32264  
Ø 3.2 32269  
Ø 3.4 32272  
Ø 3.2/3.6 32263  
Ø 3.8/4.2 32275  
Ø 5 32278<sup>®</sup>  
7-15 mm  
Ø 2 32297  
Ø 2.4/2.8 32261  
Ø 3 32267  
Ø 3.2 32270  
Ø 3.4 32273  
Ø 3.2/3.6 32264  
Ø 3.8/4.2 32274  
Ø 5 32279<sup>®</sup>  
10-18 mm  
Ø 2 32299  
Ø 2.4/2.8 32262  
Ø 3 32268  
Ø 3.2 32271  
Ø 3.4 32274  
Ø 3.2/3.6 32265  
Ø 3.8/4.2 32265<sup>®</sup>  
Ø 5 32280<sup>®</sup>  
18-25 mm  
Ø 2.0 37614<sup>®</sup>  
Ø 2.15 37619<sup>®</sup>  
Ø 2.4/2.8 37620<sup>®</sup>  
Ø 3.2 37616<sup>®</sup>  
Ø 3.4 37617<sup>®</sup>

インプラントドライバー  
NP 26 mm 29126  
NP 34 mm 29127  
RP 21 mm 29129  
RP 26 mm 29130  
RP 34 mm 29131\*  
WP 21 mm 29134  
WP 26 mm 29135

インプラントドライバー  
レンチアダプター  
NP 12mm 29132  
RP 21mm 29133\*  
WP 12mm 29136

\*セットには含まれておりません。必要に応じて別途ご購入をお願いします。 \*\*他の長さのスクレュードライバーのご用意もご用意します。  
なお、インプラントドライバー、インプラントドライバー・レンチアダプターは Bmk/SpeedyGroovy セットによって構成が異なります。詳細は P7 をご覧ください。

B ブローネマルクシステム用  
S ノーベルスピーディー・グルービー用

セットに含まれていないもの(必要に応じてご購入ください)

タップ			
	NP	RP	WP
Ø 3.3	37627 (7-15mm)		
Ø 3.75		32290 (7-13mm) 32291 (7-18mm)	
Ø 4.0		33072 (7-13mm) 33073 (7-18mm)	
Ø 5.0			32292 (7-13mm) 32293 (7-18mm)
Ø 6.0			32294 (7-13mm) 32295 (7-18mm)

ノーベルスピーディー・グルービーインプラント RP の長さ20mm、22mm、25mm用のタップはございません。



カウンターポア・Bmk			
	NP	RP	WP
	32281	32283	32285



ガイド付ボーンミル・Bmk			ボーンミルガイド・Bmk		
NP	RP	WP	NP	RP	WP
33392	33393	33495	33496	33497	33498



ドリルキット	
7-15 mm	35425



ドリル	
36118	プレジジョンドリル
35426	ガイドドリル



ツイストドリル (Ø 2mmはチップ付)			
Ø 1.5	31278 (7-15 mm)		
Ø 2.0	32296 (7-10 mm)	32297 (7-15 mm)	32299 (10-18 mm)
Ø 3.0	32266 (7-10 mm)	32267 (7-15 mm)	32268 (10-18 mm)
Ø 3.2	32269 (7-10 mm)	32270 (7-15 mm)	32271 (10-18 mm)
Ø 3.4	32272 (7-10 mm)	32273 (7-15 mm)	32274 (10-18 mm)
Ø 5.0	32278 (7-10 mm)	32279 (7-15 mm)	32280 (10-18 mm)
Ø 2.0			37614 (18-25mm) 37619 (18-25mm) ロングシャフト
Ø 3.2			37616 (18-25 mm)
Ø 3.4			37617 (18-25 mm)



ツイストステップドリル			
Ø 2.4/2.8	32260 (7-10 mm)	32261 (7-15 mm)	32262 (10-18 mm)
Ø 3.2/3.6	32263 (7-10 mm)	32264 (7-15 mm)	32265 (10-18 mm)
Ø 3.8/4.2	32275 (7-10 mm)	32276 (7-15 mm)	32277 (10-18 mm)
Ø 2.4/2.8			37618 (18-25 mm) 37620 (18-25 mm) ロングシャフト



ドリルストップ・キット	
87303	



# ノーベルアクティブ ガイデッド・ピュアセット

Guided  
SURGERY



W276.1 × D176 × H58.9 (mm)

## ノーベルアクティブ・ガイデッド・ピュアセット #87305

セットに含まれるもの(単品でのご購入も可能です)

PUR0600 ノーベルアクティブ・ガイデッド・ピュアセットトレー	
30909	ガイデッド・アンカーピン Ø1.5 mm (セットには3本入り)
29149	手用ドライバーユニグリップ 28 mm
29151	マシンドライバーユニグリップ 20 mm
34584	外科用トルクレンチ ノーベルアクティブ*
29167	補綴用トルクレンチアダプター
33065	タップホルダー・リブレイス
301165 ノーベルアクティブ・ガイデッド・ピュアセット・ウォールチャート	

\*トルクレンチはパーツを個別に分解して洗浄します。

### ガイデッド・ドリルガイド

	NP	RP 4.3
Ø 2.0 mm	32814	32815
Ø 2.8 mm	32817	32818
Ø 3.2 mm	35882	32822
Ø 3.6 mm		35883
Ø 4.2 mm		35884



### ガイデッド・インプラントマウント ノーベルアクティブ (セットには2本入り)

NP	RP 4.3
35887	35888



### ガイデッド・テンプレートアバットメント・スクリュー付 ノーベルアクティブ (セットには2本入り)

NP	RP 4.3
35890	35891



### ガイデッド・マシン用歯肉パンチ スリーブ用

NP	RP 4.3
37153	37154



既にノーベルアクティブ・ガイデッド外科用キットをお持ちのお客様は、上記赤字の製品を追加購入いただけますと、ノーベルアクティブ・ガイデッド・ピュアセット一式となります。

セットに含まれていないもの(必要に応じてご購入ください)

ガイデッド・ツイストドリル (アンカーピン用)	
Ø 1.5 x 20 mm	33066



### ノーベルアクティブ 3.0用 ガイデッド・パイロット ツイストドリル

Ø 1.5 mm (10+) 10-15 mm	37397
-------------------------	-------




ガイデッド・ツイストドリル	
Ø 2.0 (10+) 7-13 mm	33107
Ø 2.0 (10+) 7-18 mm	32746




ガイデッド・ツイストステップドリル		
	7-13 mm	7-18 mm
Ø 2.4/2.8 (10+)	35839	35844
Ø 2.8/3.2 (10+)	35840	35875
Ø 3.2/3.6 (10+)	35841	35876
Ø 3.8/4.2 (10+)	35842	35877
Ø 4.2/4.6 (10+)	35843	38045
Ø 4.2/5.0 (10+)	37934	37945



ガイデッド・ドリルガイド		
	RP 5.0	WP
Ø 2.0 mm	32816	32816
Ø 2.8 mm	38046	38046
Ø 3.6 mm	35885	35885
Ø 4.2 mm	32825	32825
Ø 4.6 mm	35886	35886
Ø 5.0 mm		32826

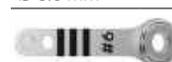

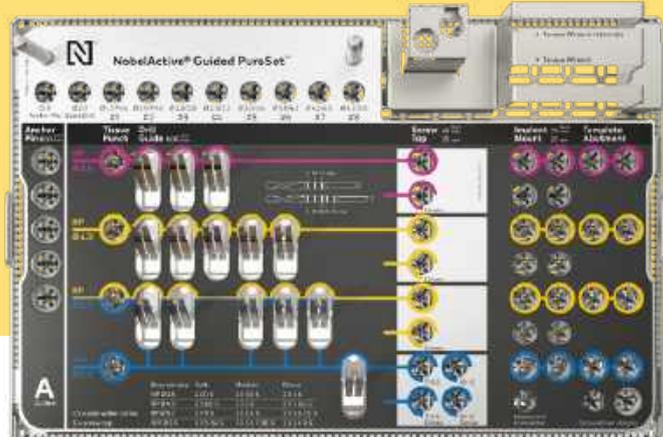

- ガイドッドツイストドリル  
Ø1.5 x 20mm  
33066\*
- ガイドッド・アンカーピン  
Ø1.5 mm  
30909
- ガイドッド・アンカーピン Ø1.5 mm  
ショートシャフト  
34761\*
- ガイドッド・マシン用歯肉バンチ  
NP 37153  
RP 37154  
WP/6.0 (5.0) 37155\*  
WP/6.0 (5.5) 38060\*

- ガイドッド・ドリルガイド NP  
#2 : 32814  
#3 : 32817  
#4 : 35862
- ガイドッド・ドリルガイド RP 4.3  
#2 : 32815  
#3 : 32818  
#4 : 32822  
#5 : 35883  
#6 : 35884
- ガイドッド・ドリルガイド RP 5.0  
#2 : 32816\*  
#3 : 38046\*  
#5 : 35885\*  
#6 : 32825\*  
#7 : 35886\*
- ガイドッド・ドリルガイド WP  
#8 : 32826\*

- ガイドッド・タップ  
NP Ø3.5 35878\*  
RP Ø4.3 35879\*  
RP Ø5.0 35880\*  
WP Ø5.5 7-8.5 37946\*  
WP Ø5.5 10-15 37947\*
- ガイドッド・デンスポーン・タップ  
NP Ø3.5 38179\*  
RP Ø4.3 38180\*  
RP Ø5.0 38181\*  
WP Ø5.5 7-8.5 38182\*  
WP Ø5.5 10-15 38183\*
- マシン用ドリルガイド WP  
29151\*\*\*
- 手用ドリルガイド WP  
29149\*\*\*

- 外科用トルクレンチ  
34584
- ガイドッド・インプラントマウント  
NP 35887  
RP Ø4.3 35888  
RP Ø5.0 35889\*  
WP Ø5.5 37948\*
- ガイドッド・テンプレートアパットメント  
NP 35890  
RP Ø4.3 35891  
RP Ø5.0 35892\*  
WP Ø5.5 37949\*
- タップホルダープレース  
33065

\*セットには含まれておりません。必要に応じて別途ご購入をお願いします。 \*\*セットには含まれておりません。他の長さのご用意もございません。 \*\*\*他の長さのスクレイドライバーのご用意もございません。

セットに含まれていないもの(必要に応じてご購入ください)

ガイドッド・タップ ノーベルアクティブ			
	NP	RP	WP
Ø 3.5 mm	35878 (8.5-10 mm)		
Ø 4.3 mm		35879 (8.5-10 mm)	
Ø 5.0 mm		35880 (8.5-10 mm)	
Ø 5.5 mm			37946 (7-8.5 mm)* 37947 (10-15 mm)**

ガイドッド・デンスポーン・タップ ノーベルアクティブ			
	NP	RP	WP
Ø 3.5 mm	38179 (8.5-18 mm)		
Ø 4.3 mm		38180 (8.5-18 mm)	
Ø 5.0 mm		38181 (8.5-18 mm)	
Ø 5.5 mm			38182 (7-8.5 mm)* 38183 (10-15 mm)**

ガイドッド・インプラントマウント ノーベルアクティブ	
RP 5.0	WP
35889	37948

ノーベルアクティブ専用です。ノーベルテーブルド CC およびノーベルパラレル CC にはご使用頂けません。

ガイドッド・テンプレート アパットメント・スクリュー付	
RP 5.0	WP
35892	37949

ノーベルテーブルド CC およびノーベルパラレル CC 用としてもご使用頂けます。品番・品名は異なりますが、サイズ・デザインは同じです。

ガイドッド・マシン用 歯肉バンチ スリーブ用	
RP 5.0	WP
37155	38060***

ガイドッド・手用歯肉バンチ (5個入り)		
NP	RP	WP
32Z2006	32Z2007 (4.3)	32Z2008
32Z2008 (5.0)		

ガイドッド・スタートドリル	
Ø 2.0 (10+)	
	37152



ガイドッド・アンカーピン	
Ø 1.5 mm ショートシャフト	
	34761



ガイドッド・ドリルストップ・キット	
	87304



ガイドッド・ドリルガイド用ハンドル	
	32813



\* No.37946 および No.38182 は、ノーベルアクティブ WP インプラント 7-8.5mm 用です。  
 \*\* No.37947 および No.38183 は、ノーベルアクティブ WP インプラント 10-15mm 用です。  
 \*\*\* No.38060 ガイドッド歯肉バンチ WP スリーブ (5.5mm 用) は、ノーベルアクティブ WP 5.5 およびノーベルパラレル CC WP 5.5-インプラント用です。No.37155 ガイドッド歯肉バンチ WP/6.0 スリーブ用 (5.0mm 用) および No.37156 ガイドッド歯肉バンチ WP/6.0 スリーブ用 (6.0mm 用) は、ノーベルアクティブ WP 5.5 およびノーベルパラレル CC WP 5.5-インプラントにご使用になれませんので、ご注意ください。

# ノーベルパラレル CC ガイドッド・ピュアセット



Guided  
SURGERY

W276.1 × D176 × H58.9 (mm)

## ノーベルパラレル CC・ガイドッド・ピュアセット

#87306

セットに含まれるもの(単品でのご購入も可能です)

<b>PUR0700</b>	ノーベルパラレル CC・ガイドッド・ピュアセット・トレー
30909	ガイドッド・アンカーピン Ø 1.5 mm (セットには3本入り)
29149	手用ドライバー ユニグリップ 28 mm
29151	マシンドライバー ユニグリップ 20 mm
28839	外科用トルクレンチ・リブレイス*
29167	補綴用トルクレンチアダプター
33065	タップホルダー・リブレイス
<b>301166</b>	ノーベルパラレル CC・ガイドッド・ピュアセット・ウォールチャート

\*トルクレンチはパーツを個別に分解して洗浄します。

### ガイドッド・ドリルガイド

	NP	RP 4.3
Ø 2.0 mm	32814	32815
Ø 2.8 mm	32817	32818
Ø 3.2 mm	35882	
Ø 3.6 mm		35883



### ガイドッド・インプラントマウント ノーベルパラレル CC (セットには2本入り)

NP	RP 4.3
38065	38066



### ガイドッド テンプレートアパットメント・スクリュー付 CC (セットには2本入り)

NP	RP 4.3
38069	37158



### ガイドッド・マシン用歯肉パンチ スリーブ用

NP	RP 4.3
38059	37154



ノーベルパラレル CC・ガイドッド・サージェリーに必要な NP および RP4.3 用のインスツルメントが含まれます。ドリル、カウンターボア、タップはセットに含まれておりませんので、別途ご購入願います。既にノーベルパラレル CC・ガイドッド外科用キットをお持ちのお客様は、上記赤字の製品を追加購入いただけますと、ノーベルパラレル CC・ガイドッド・ピュアセット一式となります。

セットに含まれていないもの(必要に応じてご購入ください)

ガイドッド・ツイストドリル (アンカーピン用)	
Ø 1.5 x 20 mm	33066




ガイドッド・ツイストドリル	
Ø 2.0 (10+) 7-13 mm	33107
Ø 2.0 (10+) 7-18 mm	32746



ガイドッド・ツイストステップドリル	7-13 mm	7-18 mm
Ø 2.4/2.8 (10+)	35839	35844
Ø 2.8/3.2 (10+)	35840	35875
Ø 3.2/3.6 (10+)	35841	35876
Ø 3.8/4.2 (10+)	35842	35877
Ø 4.2/4.6 (10+)	35843	38045
Ø 4.2/5.0 (10+)	37934	37945




ガイドッド・ドリルガイド	RP 5.0	WP
Ø 2.0 mm	32816	32816
Ø 2.8 mm	38046	38046
Ø 3.6 mm	35885	35885
Ø 4.2 mm	32825	32825
Ø 4.6 mm		35886
Ø 5.0 mm		32826

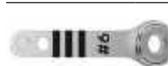

ガイドッド・カウンターボア・ノーベルパラレル CC	
Ø 3.75	38061
Ø 4.3	38062
Ø 5.0	38063
Ø 5.5	38064



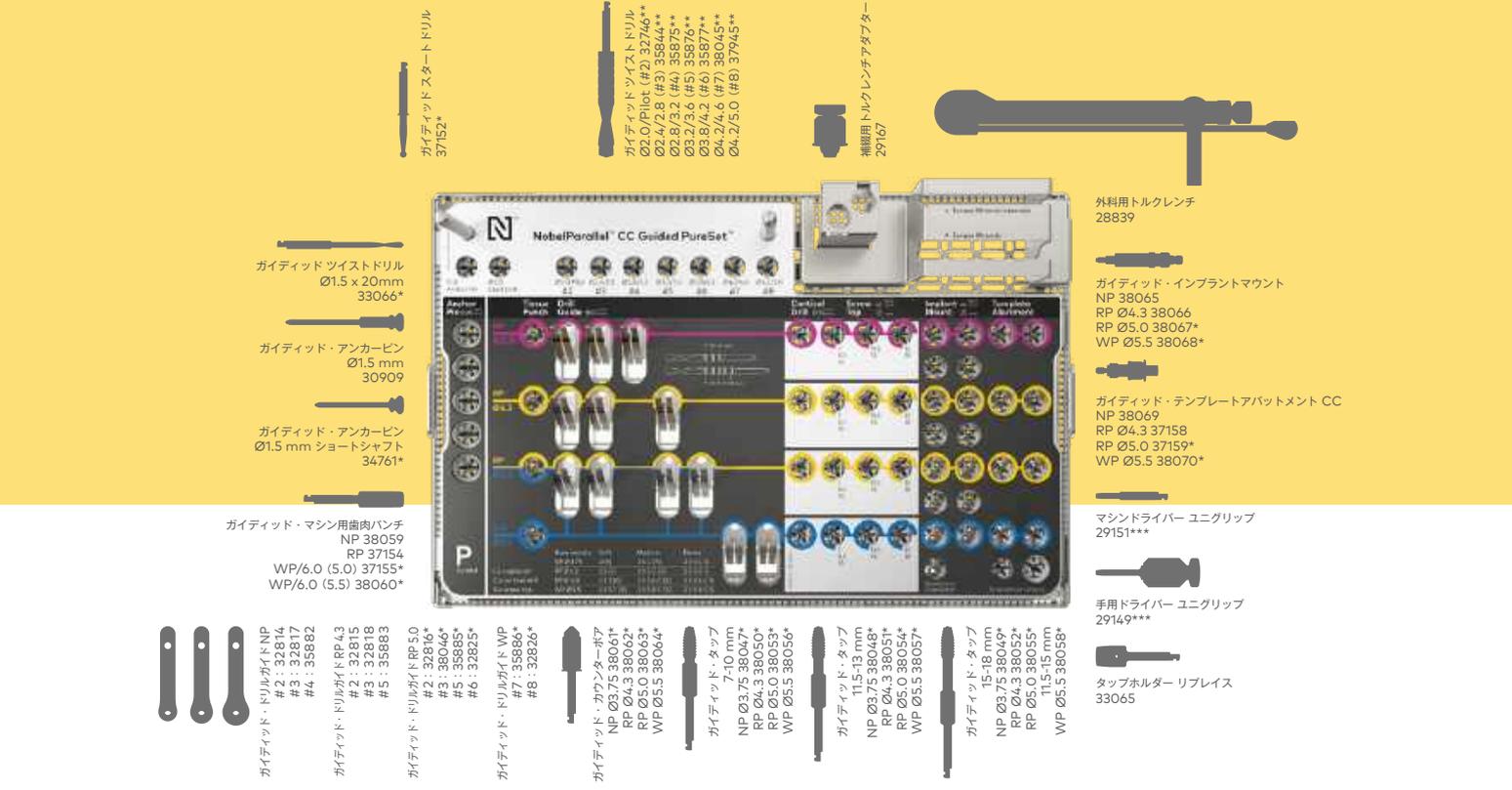

\*セットには含まれておりません。必要に応じて別途ご購入をお願いします。 \*\*セットには含まれておりません。他の長さのご用意もございます。 \*\*\*他の長さのスクレイドライバーのご用意もございます。

セットに含まれていないもの(必要に応じてご購入ください)

ガイドッド・タップ・ノーベルパラレル CC			ガイドッド・インプラントマウント ノーベルパラレル CC		ガイドッド・テンプレート アパットメント・スクリュー付 CC			
	NP	RP	WP	RP 5.0	WP	RP 5.0	WP	
Ø 3.75	38047(7-10 mm) 38048(11.5-13 mm) 38049(15-18 mm)			38067	38068	37159	38070	
Ø 4.3		38050(7-10 mm) 38051(11.5-13 mm) 38052(15-18 mm)						
Ø 5.0		38053(7-10 mm) 38054(11.5-13 mm) 38055(15-18 mm)		ノーベルテーパード CC と互換性があります。 ノーベルアクティブにはご使用頂けません。		ノーベルテーパード CC およびノーベルアクティブ としてもご使用頂けます。品番・品名は異なりますが、 サイズ・デザインは同じです。		
Ø 5.5			38056(7-10 mm) 38057(11.5-13 mm) 38058(11.5-15 mm)					
	ガイドッド・マシン用歯肉パンチ スリーブ用		ガイドッド・手用歯肉パンチ (5個入り)		ガイドッド・ドリルストップ・キット		ガイドッド・ドリルガイド用ハンドル	
	RP 5.0	WP	NP	RP	WP	87304		32813
	37155	38060*	32Z2006	32Z2007 (4.3)	32Z2008			
						ガイドッド・アンカーピン		
	コンバインド・オープンエンドレンチ		ガイドッド・スタートドリル		ガイドッド・アンカーピン			
	33247		Ø 2.0 (10+) 37152		Ø 1.5 mm ショートシャフト 34761			
								

\*No.38060 ガイドッド歯肉パンチ WPスリーブ (5.5mm用) は、ノーベルアクティブ WP 5.5 およびノーベルパラレル CC WP 5.5・インプラント用です。  
No.37155 ガイドッド歯肉パンチ WP/6.0 スリーブ用 (5.0mm用) および No.37156 ガイドッド歯肉パンチ WP/6.0 スリーブ用 (6.0mm用) は、ノーベルアクティブ WP 5.5 および  
ノーベルパラレル CC WP 5.5・インプラントにご使用になれませんので、ご注意ください。

# ノーベルテーパード CC ガイディッド・ピュアセット

Guided  
SURGERY



W276.1 × D176 × H58.9 (mm)

## ノーベルテーパード CC・ガイディッド・ピュアセット #87307

セットに含まれるもの(単品でのご購入も可能です)

<b>PUR0800</b>	ノーベルテーパード CC・ガイディッド・ピュアセット・トレー
30909	ガイディッド・アンカーピン Ø 1.5 mm (セットには3本入り)
29149	手用ドライバー ユニグリップ28 mm
29151	マシンドライバー ユニグリップ 20 mm
28839	外科用トルクレンチ・リプレイス*
29167	補綴用トルクレンチアダプター
33065	タップホルダー・リプレイス
<b>301167</b>	ノーベルテーパード CC・ガイディッド・ピュアセット・ウォールチャート

\*トルクレンチはパーツを個別に分解して洗浄します。

ガイディッド・ドリルガイド	
	NP RP 4.3
Ø 2.0 mm	32814 32815 
テーパード RP - NP	33018 

ガイディッド・ドリル・テーパード		
	NP	RP 4.3
(+) 8 mm	32827	32831
(+) 10 mm	32828	32832
(+) 11.5 mm	36119	36120
(+) 13 mm	32829	32833
(+) 16 mm	32830	32834



ガイディッド・デンスボンドリル・テーパード		
	NP	RP 4.3
13 mm	32844	32847
16 mm	32845	32848



ガイディッド・タップ・テーパード		
	NP	RP 4.3
37171**		32858



\*\*ノーベルテーパード CCインプラント NPの埋入高形成にタップを使用する場合、必ずガイディッド・タップ・テーパード NP (No.37171) を使用してください。なお、タップ・テーパード NP (No.37171) はノーベルバイオケア・テーパード・インプラントに共用です。

ガイディッド・インプラントマウント NobRpl CC (セットには2本入り)		
	NP	RP 4.3
	37149	37150



ガイディッド・テンプレートアバトメント・スクリュー付 CC (セットには2本入り)		
	NP	RP 4.3
	37157	37158



ガイディッド・マシン用歯肉パンチ スリーブ用		
	NP	RP 4.3
	37153	37154





ガイドドリット・スタートドリル  
37152\*  
ガイドドリット・ツイストドリル  
Ø2 mm  
36123\*  
ガイドドリット・ドリル・  
テーパード 8 mm  
NP Ø3.5 32827  
RP Ø4.3 32831  
WP Ø5.0 32835\*

ガイドドリット・ドリル・  
テーパード 10 mm  
NP Ø3.5 32828  
RP Ø4.3 32832  
WP Ø5.0 32836\*

ガイドドリット・ドリル・  
テーパード 11.5 mm  
NP Ø3.5 36119  
RP Ø4.3 36120  
WP Ø5.0 36121\*

ガイドドリット・ドリル・  
テーパード 13 mm  
NP Ø3.5 32829  
RP Ø4.3 32833  
WP Ø5.0 32837\*

ガイドドリット・ドリル・  
テーパード 16 mm  
NP Ø3.5 32830  
RP Ø4.3 32834  
WP Ø5.0 32838\*




外科用トルクレンチ  
28839

ガイドドリット・ツイストドリル  
Ø1.5 x 20mm  
33066\*

ガイドドリット・アンカーピン  
Ø1.5 mm  
30909

ガイドドリット・アンカーピン  
Ø1.5 mm ショートシャフト  
34761\*

ガイドドリット・マシン用歯肉パンチ  
NP 37153  
RP 37154  
WP/6.0 (5.0) 37155\*

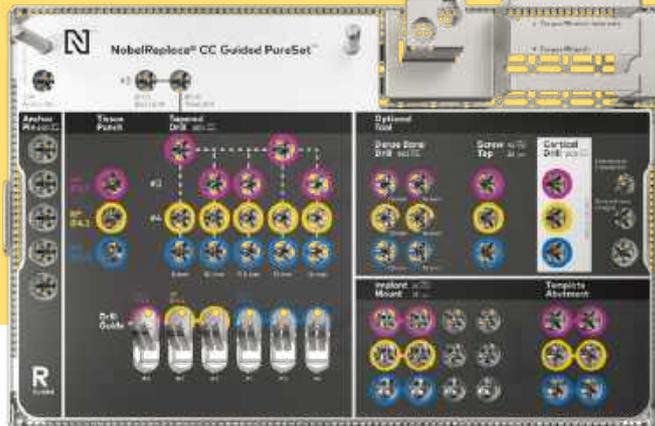

タップホルダー  
33065

マシンドライバー ユニグリップ  
29151\*\*\*

手用ドライバー ユニグリップ  
29149\*\*\*

ガイドドリット・インプラントマウント  
NP Ø3.5 37149  
RP Ø4.3 37150  
RP Ø5.0 37151\*

ガイドドリット・テンプレートアパットメント  
NP Ø3.5 37157  
RP Ø4.3 37158  
RP Ø5.0 37159\*

ガイドドリット・ドリルガイド

NP #2 : 32814  
RP #2 : 32815  
RP #3 : 33018  
RP #2 : 32816\*  
WP #3 : 33019\*  
WP #4 : 33020\*

ガイドドリット・ダンスボーン・  
ドリル  
13 mm  
NP Ø3.5 32844  
RP Ø4.3 32847  
WP Ø5.0 32850\*

ガイドドリット・ダンスボーン・  
KJUL  
16 mm  
NP Ø3.5 32845  
RP Ø4.3 32848  
WP Ø5.0 32851\*

ガイドドリット・タップマウン  
ト  
NP Ø3.5 37171  
RP Ø4.3 32856  
WP Ø5.0 32860\*

ガイドドリット・カウンターボ  
ア  
NP Ø3.5 37167\*  
RP Ø4.3 37168\*  
WP Ø5.0 37169\*

\*セットには含まれておりません。必要に応じて別途ご購入をお願いします。 \*\*セットには含まれておりません。他の長さのご用意もございます。 \*\*\*他の長さのスクレイドライバーのご用意もございます。

セットに含まれていないもの(必要に応じてご購入ください)

ガイドドリット・ツイストドリル Ø 1.5 x 20 mm	33066
テーパード Ø 2.0 x (10+) 8-16 mm	36123

ガイドドリット・ダンスボーン・ドリル・テーパード	WP
13 mm	32850
16 mm	32851
ノーベルテーパード CC RP Φ 5.0 に使用します。	

ガイドドリット・ドリル・テーパード	WP
(+) 8 mm	32835
(+) 10 mm	32836
(+) 11.5 mm	36121
(+) 13 mm	32837
(+) 16 mm	32838
ノーベルテーパード CC RP Φ 5.0 に使用します。	

ガイドドリット・ドリルガイド	RP 5.0
WP/6.0 - Ø 2.0 mm	32816
テーパード WP/6.0 - NP	33019
テーパード WP/6.0 - RP	33020

ガイドドリット・カウンターボア	
Ø 3.5	37167*
Ø 4.3	37168*
Ø 5.0	37169*

\*上記カウンターボアはノーベルバイオケア・テーパード・インプラント (Rpl/NobRpl テーパード、PS、CC・インプラント) にご使用ください。

ガイドドリット・タップ・テーパード	WP
32860	
ノーベルテーパード CC RP Φ 5.0 に使用します。	

ガイドドリット・インプラントマウント NobRpl CC	RP 5.0
37151	

ガイドドリット・インプラントマウント・NobRpl CC はノーベルテーパード CC インプラント用ですが、ノーベルパラレル CC インプラントにもご使用できます。但し、ノーベルアクティブにはご使用できません。

ガイドドリット・テンプレート アパットメント・スクレイド付 CC	RP 5.0
37159	

ノーベルアクティブおよびノーベルパラレル CC 用としてもご使用頂けます。品番・品名は異なりますが、サイズ・デザインは同じです。

ガイドドリット・マシン用 歯肉パンチ スリープ用	RP 5.0
37155	

ガイドドリット・手用歯肉パンチ (5個入り)	NP	RP	WP
32Z2006	32Z2007 (4.3)	32Z2008	
	32Z2008 (5.0)		

ガイドドリット・スタートドリル Ø 2.0 (10+)	37152
--------------------------------	-------

ガイドドリット・アンカーピン Ø1.5mm ショートシャフト	34761
-----------------------------------	-------

コンバインド・オープンエンドレンチ 33247
----------------------------

ゲージニードル 2042
-----------------

ガイドドリット・ドリルガイド用ハンドル 32813
------------------------------

リプレイスセレクト・テーパード埋入時には、ガイドドリット・インプラントマウント・NobRpl (NP : 32864, RP : 32866, WP : 32869, 6.0 : 32871) およびガイドドリット・テンプレート・アパットメント NobRpl (NP : 32803, RP : 32805, WP : 32808, 6.0 : 32811) を個別にご購入ください。

# 補綴用ピュアセット・ベーシック



W122.1 × D115 × H45.6 (mm)

## Prosthetics

### 補綴用ピュアセット・ベーシック

#87301

セットに含まれるもの(単品でのご購入も可能です)

PUR0500 補綴用ピュアセットトレイ

301232 補綴用ピュアセット・ベーシック・ウォールチャート

ハンドル・マシンインストルメント用

29161



補綴用トルクレンチ

29165\*



マシン用ドライバー ユニグリップ

20 mm 29151



30 mm 29153



マシン用ドライバー マルチユニット・アバットメント用

21 mm 29158



\* 補綴用トルクレンチ (No.29165) には、トルクレンチアダプター (No.29167) が含まれます。トルクレンチはパーツを個別に分解して洗浄します。

マシン用ドライバー オムニグリップ

20 mm 37379



30 mm 37381



既に補綴キットをお持ちのお客様は、上記赤字の製品を追加購入いただけますと、補綴用ピュアセット・ベーシック一式となります。

セットに含まれていないもの(必要に応じてご購入ください)

手用ドライバー ユニグリップ

20 mm 29148



28 mm 29149



36 mm 29150



手用ドライバー オムニグリップ

20 mm 37376



28 mm 37377



36 mm 37378



手用ドライバー オムニグリップ ミニ

20 mm 300855



36 mm 300856



手用ドライバー マルチユニット・アバットメント用

25 mm 29156



Bmk WP 29157  
25 mm



Bmk WP は External Hex WP 用です。

ハンドル マシン  
インストルメント用  
29161

補綴用トルクレンチ  
29165



※Multi-Unit 左側のトルク値 (20) は NobelBiocareN1™  
補綴用のトルク値を示しています。

\* 他の長さのスクレュードライバーのご用意もございます。



セットに含まれていないもの (必要に応じてご購入ください)

マシン用ドライバー ユニグリップ

25 mm	29152	
35 mm	29154	

マシン用ドライバー オムニグリップ

25 mm	37380	
35 mm	37382	

マシン用ドライバー オムニグリップ ミニ

20mm	300852	
28mm	300853	
36mm	300854	


マシン用ドライバー マルチユニット・アバットメント用

Bmk WP 20 mm	29159	
-----------------	-------	--

Bmk WP は External Hex WP 用です。

# 補綴用ピュアセット・NB N1

Prosthetics

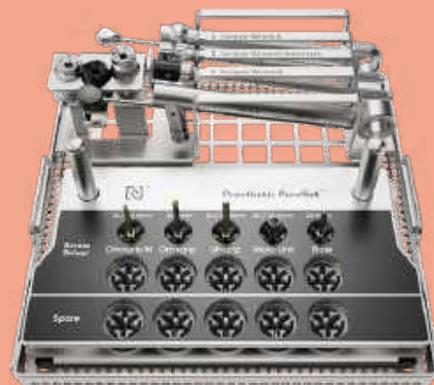

W122.1 × D115 × H45.6 (mm)

## 補綴用ピュアセット・NB N1

#87302

セットに含まれるもの(単品でのご購入も可能です)

PUR0500 補綴用ピュアセットトレー

301076 補綴用ピュアセット・NB N1・ウォールチャート

ハンドル・マシンインストルメント用

29161



マシン用ドライバー NB N1 ベース

28 mm 300903



マシン用ドライバー ユニグリップ

30 mm 29153



マシン用ドライバー マルチユニット・アパットメント用

21 mm 29158



補綴用トルクレンチ NB N1

301082\*



マシン用ドライバー オムニグリップ ミニ

28 mm 300853



\* 補綴用トルクレンチには、トルクレンチアダプターが含まれます。N1 補綴用トルクレンチ付属のアダプターの単品販売はございませんが、補綴用トルクレンチアダプター (No. 29167) を代替としてご使用いただけます。

セットに含まれていないもの(必要に応じてご購入ください)

手用ドライバー ユニグリップ

20 mm 29148



28 mm 29149



36 mm 29150



手用ドライバー NB N1 ベース

28 mm 301135



36 mm 301136



手用ドライバー オムニグリップ ミニ

20 mm 300855



36 mm 300856



手用ドライバー マルチユニット・アパットメント用

25 mm 29156






ハンドル マシン  
インストルメント用  
29161



補綴用トルクレンチ NB N1  
301082

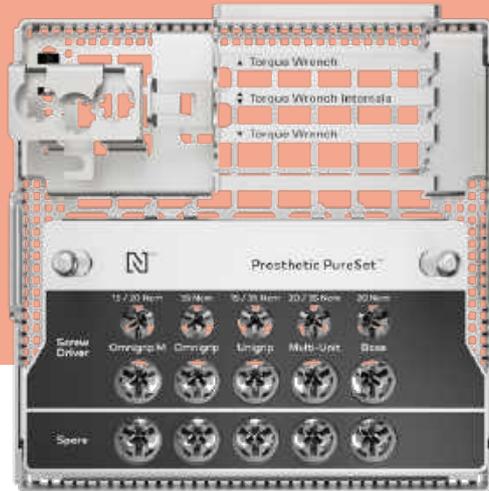

※Multi-Unit 左側のトルク値 (20) は NobelBiocareN1™  
補綴用のトルク値を示しています。

\* 他の長さのスクリュードライバーのご用意もございます。



マシン用ドライバー  
ユニグリップ\*  
30 mm 29153



マシン用ドライバー  
オムニグリップミニ  
28 mm 300853



マシン用ドライバー  
NB N1 ベース用\*  
28 mm 300903



マシン用ドライバー  
マルチユニット用  
21 mm 29158

セットに含まれていないもの (必要に応じてご購入ください)

マシン用ドライバー ユニグリップ	
20 mm	29151 
25 mm	29152 
35 mm	29154 

マシン用ドライバー NB N1 ベース	
36 mm	300904 

マシン用ドライバー オムニグリップ ミニ	
20mm	300852 
36mm	300854 

## ピュアセット・トレイ アクセサリー

スペアパーツ (プレート) \*

PUR0201	ノーベルアクティブ/ノーベルパラレル CC・ピュアセット・プレート
PUR0301	ノーベルテーパーバードCC・ピュアセット・プレート
PUR0401	NB N1 ピュアセット・プレート
PUR0901	ノーベルスピーディー・ブルービー/フローネマルクスシステム/ RepSel TC・ピュアセット・プレート
PUR0601	ノーベルアクティブ・ガイデッド・ピュアセット・プレート
PUR0701	ノーベルパラレルCC・ガイデッド・ピュアセット・プレート
PUR0801	ノーベルテーパーバードCC・ガイデッド・ピュアセット・プレート
PUR0501	補綴用ピュアセット・プレート



\* プレートには、インストルメントやドリルを保持する部分は含まれておりません。  
ご購入の際には、各ピュアセットに応じたプレートをお求めください。

一般的名称：

電動式歯科用インプラント手術器具 医療機器認証番号：303AGBZX00055000, 303AGBZX00072000

歯肉切除メス 医療機器届出番号：13B1X10405400010

歯科インプラント補綴用器具 医療機器届出番号：13B1X10405400018, 13B1X10405400053, 13B1X10405400065

歯科用インプラント手術器具 医療機器届出番号：13B1X10405400001, 13B1X10405400011, 13B1X10405400026, 13B1X10405400068

手術用ドリルアタッチメント 医療機器届出番号：13B1X10405400021, 13B1X10405400022, 13B1X10405400023, 13B1X10405400034, 13B1X10405400066

手術用ドリルビット 医療機器届出番号：13B1X10405400017, 13B1X10405400019, 13B1X10405400020, 13B1X10405400047, 13B1X10405400054

# ピュアセット シリーズ – 推奨洗浄方法

## 洗浄、消毒、乾燥

### ▶ 自動洗浄、消毒、乾燥（前洗浄含む）の場合

- 1 ピュアセット・トレー（以下、トレー）から、複数のパーツで組み立てられているインスツルメント（例：外科用トルクレンチなど）を取り外し、マニュアルに記載の方法に従って、パーツを分解し、洗浄します。
- 2 洗浄し難い箇所（例：内部注水用ホール等）があるドリル等をすべて取り外し、マニュアルに記載の方法に従って、洗浄します。
- 3 トレーからピュアセット・プレートを取り外します。
- 4 トレー、インスツルメント、ドリル（プレートが無い状態）を40℃の0.5%弱アルカリ性洗浄溶液が入った超音波洗浄器に入れ、5～10分間処理します。（超音波洗浄器および洗浄剤メーカーの使用説明書に従ってください。）※プレートは、超音波洗浄器で処理しないでください。
- 5 トレーとプレートを別々にウォッシャー・ディスインフェクターに入れ、自動洗浄と消毒を実施します。
- 6 ウォッシャー・ディスインフェクター 製造販売元の指示に従って、トレーとプレートを乾燥させます。  
※注意：pH8.5～11以外の洗浄剤を使用するとプレートが変色や損傷する可能性があります。

### ▶ 手作業での洗浄、消毒、乾燥の場合

- 1 トレーから、複数のパーツで組み立てられているインスツルメント（例：外科用トルクレンチなど）を取り外し、マニュアルに記載の洗浄方法に従って、パーツを分解、洗浄します。
- 2 洗浄し難い箇所（例：内部注水用ホール等）があるドリル等をすべて取り外し、マニュアルに記載の方法に従って、洗浄します。
- 3 トレーからピュアセット・プレートを取り外します。
- 4 目視できるすべての汚れが取り除かれるまで、ナイロン製の柔らかいブラシを使用して、流水（水道水）でトレーを洗浄します。
- 5 プレートは、ナイロン製の柔らかいブラシに40℃の0.5%弱アルカリ性洗浄溶液をつけ、目視できる全ての汚れが除去されるまで洗浄します。  
※注意：pH8.5～11以外の洗浄剤を使用するとプレートが変色や損傷する可能性があります。
- 6 流水（水道水）でプレートをすすぎ、洗浄剤の製造販売元の指示に従って洗浄液を落としします。
- 7 目視できるすべての汚れを取り除くまで、グロメット（インスツルメントを保持している部分）を洗い流します。
- 8 40℃の0.5%弱アルカリ性洗浄溶液を用いて、トレー、インスツルメント、ドリル（プレートが無い状態）を超音波洗浄器で5～10分間処理します。（超音波洗浄器および洗浄剤の使用に関しては、製造販売元の取扱説明書に従ってください。）  
※プレートは、超音波洗浄器で処理しないでください。
- 9 流水（水道水）で、トレーを濯ぎ、洗浄液を落としします。
- 10 圧縮エアでトレーとプレートを乾燥させます。
- 11 室温（20±10℃）の状態、消毒液にトレーを12分間浸します。プレートは、消毒液に入れないでください。
- 12 清拭消毒でプレートを1分±10秒間消毒します。（消毒については、使用する清拭消毒の製造販売元の指示に従ってください。）
- 13 精製水でプレートとトレーを1分±10秒間で3回濯ぎ、消毒液をすべて除去します。
- 14 圧縮エアでトレーとプレートを乾燥させます。
- 15 トレーにすべてのドリルやインスツルメント、プレートを戻します。

### ▶ 滅菌法

高圧蒸気滅菌してください。

推奨滅菌条件：予備真空がある場合：温度：132～134℃ / 暴露時間：4分間以上  
院内で指定され、バリデートされた滅菌条件があればそれに従ってください。


予備真空がない場合：温度：132～134℃ / 暴露時間：20分間以上

### 《ご注意！》

・強アルカリ性洗浄剤のご使用は避けてください。プレートが変色することがございます。（推奨は、pH8.5～11の弱アルカリ性の洗浄剤です。） ・中和剤のご使用を避けてください。

## サイズの目安

お手持ちの洗浄器・滅菌器をご利用いただく際のご参考にしてください。

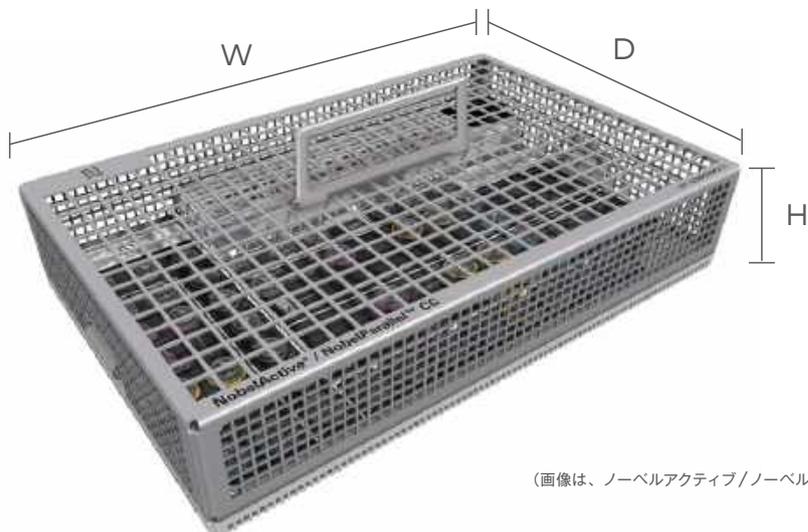

(画像は、ノーベルアクティブ/ノーベルパラレル CC ピュアセット・トレイ)

## 製品名の概要

### ピュアセット・トレイ

- ・インスツルメントやドリルが入っていない空の状態のボックスです。プレートやグローメットが含まれます。
- ・単品でのご購入が可能です。



### プレート

- ・アルミニウム製
- ・ウォッシャー・ディスインフェクター使用時は、トレイから外して、別々に入れます。
- ・超音波洗浄は不可です。
- ・単品でのご購入が可能です。

### グローメット (ドリルやインスツルメント保持部)

- ・PEEK製部分とステンレススチール製部分で構成されています。

---

### オンラインでご注文

ノーベルバイオケアのオンラインストアから  
インプラントおよび関連製品を幅広いラインナップより  
24時間いつでもご注文いただけます。  
(発送手続きは営業時間内)

[store.nobelbiocare.com/jp](https://store.nobelbiocare.com/jp)

---

### お電話またはファックスにてご注文

カスタマーサービスにお電話をいただくか、  
またはファックスにてご注文いただけます。

TEL 0120-147-118

FAX 0120-726-118

---

### 製品保証プログラム

ノーベルバイオケアでは、製品の保証プログラムを  
適用しております。詳細に付きましては、  
弊社までお問い合わせください。



[nobelbiocare.com](https://nobelbiocare.com)

MK355C JP 2504 © Nobel Biocare services AG, 2025. All rights reserved.

ノーベルバイオケア、ノーベルバイオケアのロゴ、および本書で使用されているその他のすべての商標は、別途記載されていない限り、  
また文脈から明白である場合を除き、ノーベルバイオケアの商標です。このパンフレット内の製品画像は、必ずしも縮尺どおりではありません。

製造販売元: エンビスタジャパン株式会社

販売元: ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー13F TEL 03-6408-4182

