

# Provisionalización inmediata de un incisivo central

Arturo Llobell  
España



Arturo Llobell

**Paciente**

40 años, mujer

**Situación clínica**

Fracaso del tratamiento endodóntico de un incisivo central

**Solución quirúrgica**

Alveolo postextracción, colocación inmediata de un implante NobelActive® TiUltra™, injerto óseo menor con creos™ xenogain, pilar provisional Snap

**Solución restauradora**

Corona de zirconia con recubrimiento cerámico estratificado solo en la cara vestibular

**Fecha de la cirugía**

Abril 2019

**Duración total del tratamiento**

3 meses

**Posición del diente**

11

Incisivo central con mal pronóstico que tuvo que ser extraído. Se colocó un implante inmediato NobelActive® TiUltra™ con un pilar provisional Snap y provisionalización inmediata.

El resultado clínico 5 meses después de la colocación del implante muestra tejidos duros y blandos estables y sanos.



## Situación clínica inicial

## Procedimiento quirúrgico

## Procedimiento restaurador

## Resultado



Situación clínica inicial.

Radiografía y CBCT mostrando la endodoncia fallida y el tratamiento restaurador. El paciente rechazó opciones de tratamiento ortodóntico de erupción forzada.

## Situación clínica inicial

## Procedimiento quirúrgico

## Procedimiento restaurador

## Resultado



La sangre es atraída a lo largo de las roscas de la superficie hidrofílica TiUltra™ durante la colocación del implante.

Colocación inmediata de un implante NobelActive® TiUltra™ 3.5 x 13 mm en un alveolo postextracción reciente.

## Situación clínica inicial



Conservación de hueso con creos™ xenogain.

## Procedimiento quirúrgico



Pilar provisional Snap colocado.

## Procedimiento restaurador




Polimerizado de la resina durante la restauración provisional.

## Situación clínica inicial

## Procedimiento quirúrgico

## Procedimiento restaurador

## Resultado

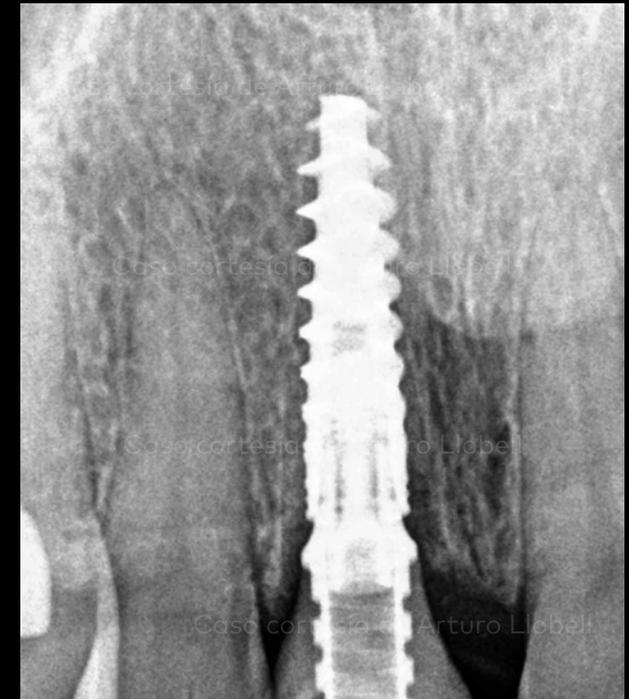

Restauración provisional colocada el mismo día de la cirugía.

Radiografía el mismo día de la cirugía.

## Situación clínica inicial

## Procedimiento quirúrgico

## Procedimiento restaurador

## Resultado




Cofia de impresión personalizada.

## Situación clínica inicial

## Procedimiento quirúrgico

## Procedimiento restaurador

## Resultado

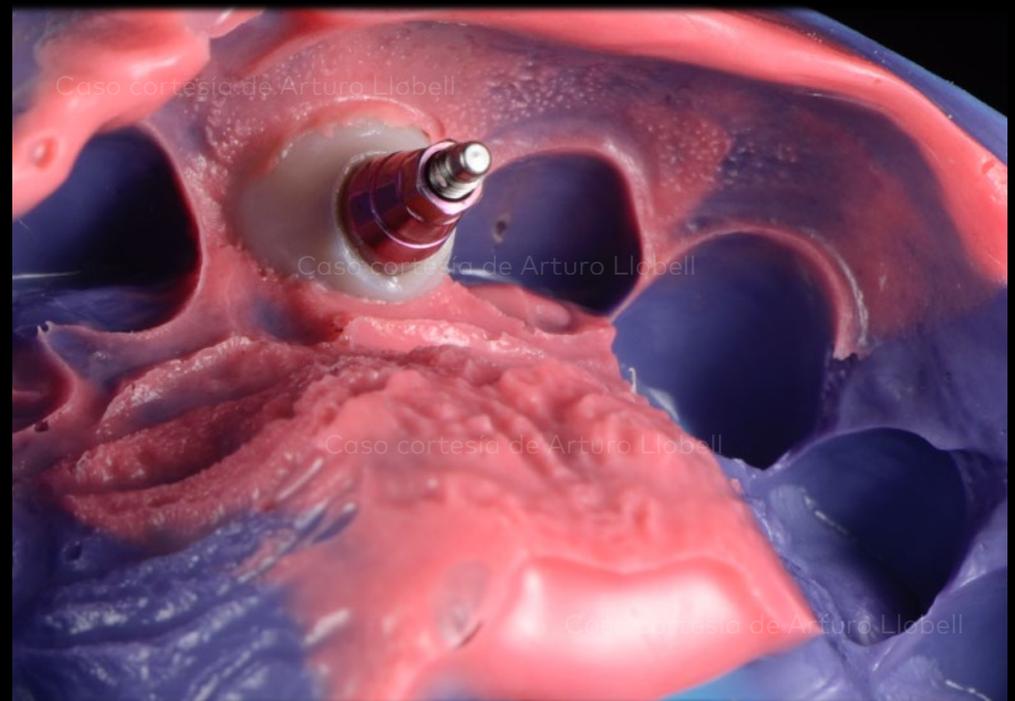


Impresión definitiva utilizando la cofia de impresión personalizada para trasladar el perfil de emergencia a la futura restauración definitiva.

## Situación clínica inicial

## Procedimiento quirúrgico

## Procedimiento restaurador

## Resultado

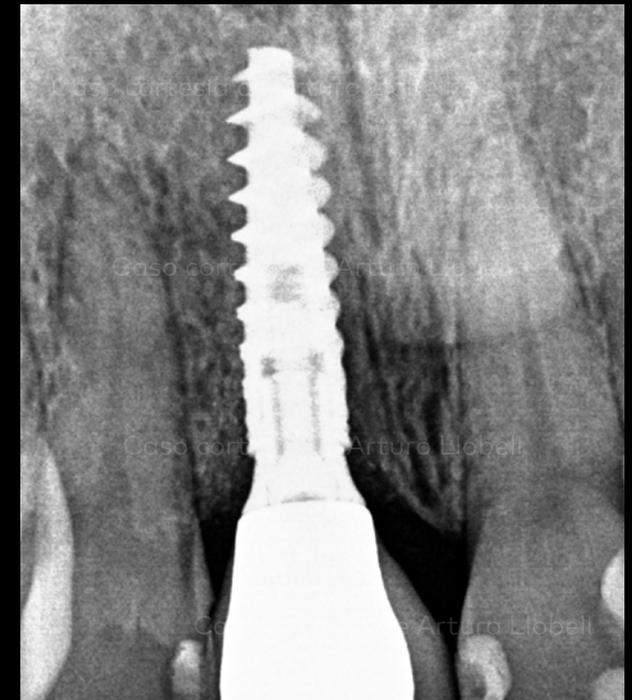

Situación clínica después de 5 meses tras la colocación del implante.

Radiografía en el seguimiento a los 5 meses.

## Caso cortesía de Dr. Arturo Llobell

