

Temporary solutions



テンポラリースナップ・アバットメント エンゲージング テンポラリースナップ・シリンダー

便利なスナップイン・タイプのテンポラリースナップ・アバットメント エンゲージングおよびマルチユニット・アバットメント用テンポラリースナップ・シリンダーのご紹介です。

パチッと嵌め込むことができるため、スクリューを使用することなく、試適時に暫間補綴装置の着脱が可能になり、従来と比較してケアタイムを短縮します。テンポラリースナップ・アバットメント/シリンダーは、インターナル・コニカル・コネクション用のみとなります。

スナップイン・タイプ

スクリューを使用することなく、試適時に暫間補綴装置の着脱が可能です。

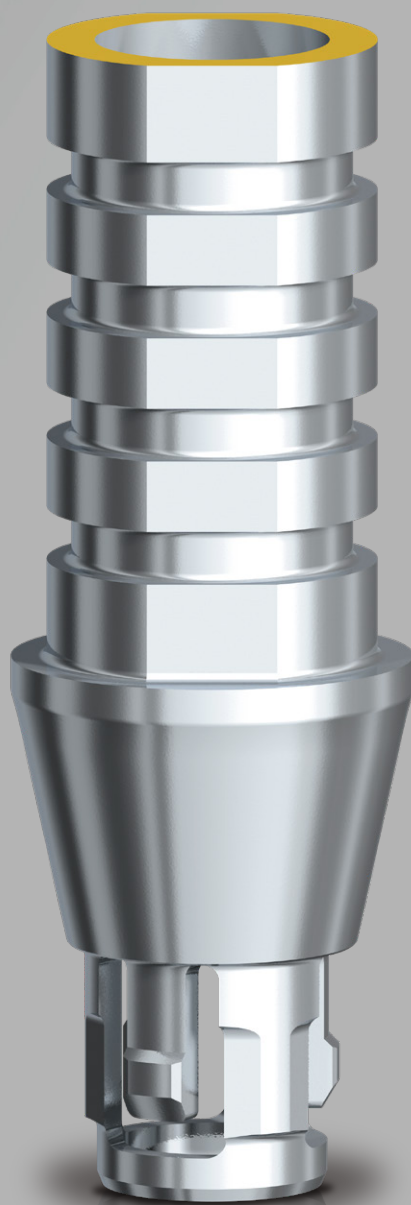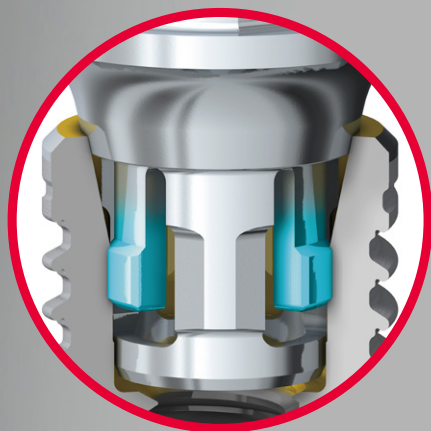

マージンの高さは2種類


テンポラリースナップ・アバットメントは歯肉の厚みに応じて1.5mmまたは3mmからお選びいただけます。

*表紙の画像は
テンポラリースナップ・アバットメントです。

テンポラリースナップ・アバットメント

テンポラリースナップ・アバットメント CC インプラント用	製品番号	製品名
	38760	テンポラリースナップ・アバットメント エンゲージング CC NP 1.5mm
	38761	テンポラリースナップ・アバットメント エンゲージング CC RP 1.5mm
	38762	テンポラリースナップ・アバットメント エンゲージング CC WP 1.5mm
	38847	テンポラリースナップ・アバットメント エンゲージング CC NP 3mm
	38848	テンポラリースナップ・アバットメント エンゲージング CC RP 3mm
	38849	テンポラリースナップ・アバットメント エンゲージング CC WP 3mm

[未滅菌品] (アバットメントスクリュー付)

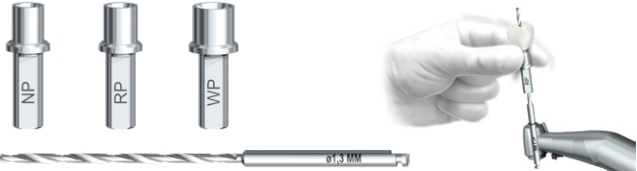ドリルガイド/アピカルドリル	製品番号	製品名
	38855	プロテクションアナログ/ドリルガイド CC NP 5個パック
	38856	プロテクションアナログ/ドリルガイド CC RP 5個パック
	38857	プロテクションアナログ/ドリルガイド CC WP 5個パック
	38853	アピカルドリル・テンポラリースナップ・アバットメント/シリンダー用
		専用の製品をお使いいただき、アバットメントへの損傷を防ぎながら、スクリューアクセスホールを簡便に形成していただけます。

[未滅菌品]

テンポラリースナップ・シリンダー マルチユニット・アバットメントXeal用

テンポラリースナップ・シリンダー マルチユニット・アバットメントXeal用	製品番号
	38915
	補綴用スクリュー付

マルチユニット・アバットメント プラスにも互換性がありますが、それ以前に販売していた旧マルチユニット・アバットメントには互換性がありません。

[未滅菌品]

ドリルガイド/アピカルドリル マルチユニット・アバットメントXeal用	製品番号	製品名
	38917	ドリルガイド
	38853	アピカルドリル

[未滅菌品]

アピカルドリルは共通です。

スクリューアクセス ホールの形成を簡便に。
専用のドリルガイドをテンポラリースナップ・シリンダーに挿入し、アピカルドリルを使用して、スクリューアクセス ホールを簡便に形成することができます。



注意事項:

スナップイン機能を利用して口腔内で試適をしている間は、患者が舌で押すなどして、外れることがあるため、注意してください。最終的な装着は、補綴用トルクレンチとマシン用ドライバー・ユニグリップを使用して、テンポラリースナップ・アバットメントはスクリューを35Ncmで締結し、テンポラリースナップ・シリンダーはスクリューを15Ncmで締結します。

医療機器承認番号 22900BZX00191000

医療機器認証番号 224ADBZX00006000

医療機器届出番号 13B1X10405400006, 13B1X10405400039



nobelbiocare.com

MK350C JP 2505© Nobel Biocare services AG, 2025. All rights reserved.

ノーベルバイオケア、ノーベルバイオケアのロゴ、および本書で使用されているその他のすべての商標は、別途記載されていない限り、また文脈から明白である場合を除き、ノーベルバイオケアの商標です。このパンフレット内の製品画像は、必ずしも縮尺どおりではありません。

製造販売元: エンビスタジャパン株式会社

販売元: ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー13F TEL 03-6408-4182

