



Instrumentos de resgate

Soluções para
QUALQUER SITUAÇÃO

Descrição geral do produto



RESGATE DE PILARES

A remoção de um pilar com uma conexão cônica estreita é simples com o Abutment Release Pin (parafuso para remover pilares).

Para restaurações de titânio e zircônia, incluindo o pilar NobelProcera® Angulated Screw Channel (ASC) e a coroa de implante em zircônia de contorno completo (FCZ), a remoção é simplificada com uma gama de instrumentos específicos para o resgate de pilares.



REMOÇÃO DE PILARES/PARAFUSOS CLÍNICOS

No caso de um parafuso do pilar se partir, existe uma solução segura, mesmo quando parte do parafuso permanece no acesso ao parafuso.

Embora o Abutment Screw Remover (instrumento de remoção de parafuso de pilar) resolva a maioria desses casos de forma eficiente, as Reverse Drills (brocas de inversão) e os Entabua Retrieval Instruments (instrumentos de resgate de pilares) permitem o resgate em casos mais complexos.



RESGATE DE IMPLANTES

Tratar de um caso de resgate em que não é possível fazê-lo com o transportador de implante?

O Implant Retrieval Instrument (instrumento de resgate de implantes) foi concebido precisamente para este cenário, independentemente se é devido a fratura do implante, a uma conexão danificada ou a uma forte osteointegração. Para os casos mais difíceis, estão disponíveis as Trephine Drills (brocas de trefina).

Instrumentos de resgate de implantes

Implant Retrieval Instruments

| | | Conexão cônica trioval | Conexão cônica | Tri-channel | Hexagonal externa |
|-------|--------|------------------------|----------------|-------------|-------------------|
| 22 mm | 37471 | | | NP, RP | NP, RP |
| 31 mm | 37472 | | | NP, RP | NP, RP |
| 31 mm | 37473 | | 3.0 | | |
| 22 mm | 37474 | | NP | | WP |
| 22 mm | 37475 | | RP | WP | |
| 22 mm | 37476 | | | 6.0 | |
| 22 mm | 37927 | | WP | | |
| 31 mm | 301294 | NP | 3.0 | | |
| 22 mm | 301295 | RP | RP | WP | |



Implant Rescue Collar

| Ø | | Tri-channel |
|--------|-------|-------------|
| 3.5 mm | 37478 | NP |
| 4.3 mm | 37479 | RP |



Trephine Drills

| Ø | | Conexão cônica trioval | Conexão cônica | Tri-channel | Hexagonal externa |
|------------|-------|------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|
| 3.2/4.0 mm | 37477 | | 3.0 | | |
| 3.8/4.6 mm | 37928 | NP | NP | NP | NP |
| 4.4/5.2 mm | 37929 | RP | RP | RP, NobelReplace Platform Shift | NP RP |
| 5.2/6.2 mm | 37930 | | RP | WP, NobelReplace Platform Shift | RP WP |
| 5.6/6.6 mm | 37931 | | WP | | |
| 6.2/7.0 mm | 37932 | | | 6.0, NobelReplace Platform Shift | WP WP |



Handle for Implant Rescue Collar & Guides

37480



Instrumentos de resgate de parafuso do pilar

Abutment Screw Remover

| | Conexão cônica trioval | Conexão cônica | Tri-channel | Hexagonal externa |
|---------|------------------------|----------------|-------------|-------------------|
| 3.0 | | 37505 | | |
| NP | 37505, 37506, 37507 | 37506 | 37506 | 37506 |
| RP | 37505, 37506, 37507 | 37507 | 37507 | 37507 |
| WP, 6.0 | | 37507 | 37507 | 37507 |



Nobel Biocare N1™ Base Screw Removal Tool

| | Conexão cônica trioval |
|--------|------------------------|
| NP, RP | 301702 |



Screw Tap Repair

| | | Conexão cônica trioval | Conexão cônica | Tri-channel | Hexagonal externa |
|------|--------|------------------------|----------------|-------------|-------------------|
| M1.4 | 37497 | | 3.0 | | |
| M1.6 | 37498 | | NP | | NP |
| M1.8 | 37499 | | | NP | |
| M2 | 37517 | | RP, WP | RP, WP, 6.0 | RP |
| M2.5 | 37500 | | | | WP |
| | 301151 | NP | | | |
| | 301152 | RP | | | |



Instrumentos de resgate de parafuso do pilar

Abutment Screw Retrieval Reverse Drill

| | Conexão cônica trioval | Conexão cônica | Tri-channel | Hexagonal externa |
|---------|------------------------|----------------|-------------|-------------------|
| 3.0 | | 37501, 301296 | | |
| NP | 301296 | 37501, 301296 | 37501 | 37501 |
| RP | 301296 | 37502 | 37502 | 37502 |
| WP, 6.0 | | 37502 | 37502 | 37502 |



Abutment Screw Retrieval Instrument

| | Conexão cônica trioval | Conexão cônica | Tri-channel | Hexagonal externa |
|---------|------------------------|----------------|-------------|-------------------|
| 3.0 | | 37503, 301297 | | |
| NP | 301297 | 37503, 301297 | 37503 | 37503 |
| RP | 301297 | 37504 | 37504 | 37504 |
| WP, 6.0 | | 37504 | 37504 | 37504 |



Rescue Drill Guide

| | Conexão cônica trioval | Conexão cônica | Tri-channel | Hexagonal externa |
|-----|------------------------|----------------|-------------|-------------------|
| 3.0 | | 37485 | | |
| NP | 300919 | 37486 | 37488 | 37482 |
| RP | 300920 | 37487 | 37489 | 37483 |
| WP | | 37933 | 37490 | 37484 |
| 6.0 | | | 37491 | |



Handle for Implant Rescue Collar & Guides

37480



Handle for Machine Instruments

29161



Instrumentos de resgate de pilares

Abutment Retrieval Instrument Zirconia

| | Conexão cônica |
|--------|----------------|
| NP | 37512 |
| RP, WP | 37882 |



Abutment Retrieval Instrument Titanium

| | Conexão cônica trioval | Conexão cônica |
|----|--------------------------------|----------------|
| NP | 301521 (longo), 301533 (curto) | 36247 |
| RP | 301522 (longo), 301534 (curto) | 37881 |
| WP | | 37881 |



Abutment Release Pin

| | Conexão cônica |
|--------|----------------|
| 3.0 | 37509 |
| NP | 37510 |
| RP, WP | 37511 |



Codificação por cores consistente

Os componentes protéticos são codificados por cores para uma identificação rápida e precisa.

| | | | |
|-------------------|--|--|---|
| 3.0 | NP | RP | WP |
| Plataforma 3.0 | Narrow Platform (Plataforma Estreita) | Regular Platform (Plataforma Regular) | Wide Platform (Plataforma Larga) |

Conjuntos

Resgate de implantes

87309 Implant Retrieval Set

| O conjunto inclui: | | QTD |
|--------------------|---|-----|
| 301343 | Implant Retrieval Set Organizer | 1 |
| 37471 | Impl Retrieval Instrument Ext Hex & Tri-Channel NP/RP 22 mm | 1 |
| 37472 | Impl Retrieval Instrument Ext Hex & Tri-Channel NP/RP 31 mm | 1 |
| 37473 | Implant Retrieval Instrument CC 3.0 31 mm | 1 |
| 37474 | Implant Retrival Instrument CC NP & Ext Hex WP 22 mm | 1 |
| 37475 | Implant Retrival Instrument CC RP & Tri-Channel WP 22 mm | 1 |
| 37476 | Implant Retrieval Instrument Tri-Channel 6.0 22 mm | 1 |
| 37927 | Implant Retrieval Instrument CC WP 22 mm | 1 |
| 37477 | Trephine Drill 3.2/4.0 mm | 1 |
| 37928 | Trephine Drill 3.8/4.6 mm | 1 |
| 37929 | Trephine Drill 4.4/5.2 mm | 1 |
| 37930 | Trephine Drill 5.2/6.2 mm | 1 |
| 37931 | Trephine Drill 5.6/6.6 mm | 1 |
| 37932 | Trephine Drill 6.2/7.0 mm | 1 |
| 37478 | Implant Rescue Collar Tri-Channel Ø 3.5 | 1 |
| 37479 | Implant Rescue Collar Tri-Channel Ø 4.3 | 1 |
| 37480 | Handle for Implant Rescue Collar & Drill Guides | 1 |



Nota: tenha em atenção que o conteúdo dos conjuntos pode variar consoante o mercado e que o número de artigo do conjunto se refere a um número de encomenda interno e não é visível na guia de remessa ou na fatura. Os artigos dos conjuntos também são vendidos em separado.

Conjuntos

Resgate de parafusos do pilar

87308 Abutment Screw Retrieval Set

| O conjunto inclui: | | QTD |
|--------------------|--|-----|
| 301344 | Abutment Screw Retrieval Set Organizer | 1 |
| 37482 | Rescue Drill Guide External Hex NP | 1 |
| 37483 | Rescue Drill Guide External Hex RP | 1 |
| 37484 | Rescue Drill Guide External Hex WP | 1 |
| 37485 | Rescue Drill Guide Conical Connection 3.0 | 1 |
| 37486 | Rescue Drill Guide Conical Connection NP | 1 |
| 37487 | Rescue Drill Guide Conical Connection RP | 1 |
| 37933 | Rescue Drill Guide Conical Connection WP | 1 |
| 37488 | Rescue Drill Guide Tri-Channel NP | 1 |
| 37489 | Rescue Drill Guide Tri-Channel RP | 1 |
| 37490 | Rescue Drill Guide Tri-Channel WP | 1 |
| 37491 | Rescue Drill Guide Tri-Channel 6.0 | 1 |
| 37501 | Abutment Screw Retrieval Reverse Drill 3.0/NP | 2 |
| 37502 | Abutment Screw Retrieval Reverse Drill RP/WP/6.0 | 2 |
| 37503 | Abutment Screw Retrieval Instrument 3.0/NP | 1 |
| 37504 | Abutment Screw Retrieval Instrument RP/WP/6.0 | 1 |
| 37505 | Abutment Screw Remover 3.0 | 1 |
| 37506 | Abutment Screw Remover NP | 1 |

87308 Abutment Screw Retrieval Set

| O conjunto inclui: | | QTD |
|--------------------|---|-----|
| 37507 | Abutment Screw Remover RP/WP/6.0 | 1 |
| 37497 | Screw Tap Repair M1.4 | 1 |
| 37498 | Screw Tap Repair M1.6 | 1 |
| 37499 | Screw Tap Repair M1.8 | 1 |
| 37517 | Screw Tap Repair M2.0 | 1 |
| 37500 | Screw Tap Repair M2.5 | 1 |
| 37480 | Handle for Implant Rescue Collar & Drill Guides | 1 |
| 29161 | Handle for Machine Instruments | 1 |



Nota: tenha em atenção que o conteúdo dos conjuntos pode variar consoante o mercado e que o número de artigo do conjunto se refere a um número de encomenda interno e não é visível na guia de remessa ou na fatura. Os artigos dos conjuntos também são vendidos em separado.

Conjuntos

Resgate de pilares

87338 Abutment Retrieval Set

| O conjunto inclui: | | QTD |
|--------------------|---|-----|
| 37509 | Abutment Release Pin CC 3.0 | 1 |
| 37510 | Abutment Release Pin CC NP | 1 |
| 37511 | Abutment Release Pin CC RP/WP | 1 |
| 37512 | Abutment Retrieval Instrument Zirconia CC NP | 1 |
| 37882 | Abutment Retrieval Instrument Conical Connection RP/WP Zirconia | 1 |
| 36247 | Abutment Retrieval Tool Conical Connection NP Titanium | 1 |
| 37881 | Abutment Retrieval Instrument Conical Connection RP/WP Titanium | 1 |

Nota: tenha em atenção que o conteúdo dos conjuntos pode variar consoante o mercado e que o número de artigo do conjunto se refere a um número de encomenda interno e não é visível na guia de remessa ou na fatura. Os artigos dos conjuntos também são vendidos em separado.



ENCOMENDAS ONLINE

Encomende a nossa gama completa de implantes e restaurações protéticas pré-fabricadas, 24 horas por dia, através da loja online da Nobel Biocare.

nobelbiocare.com/store

nobelbiocare.com/rescue



88571 PT 2304 Impresso na UE © Nobel Biocare Services AG, 2023. Todos os direitos reservados. Nobel Biocare, o logótipo da Nobel Biocare e todas as restantes marcas comerciais são, caso não exista nenhuma declaração adicional ou isso não seja evidente pelo contexto de determinados casos, marcas comerciais da Nobel Biocare. Consulte nobelbiocare.com/trademarks para obter mais informações. As imagens dos produtos não estão necessariamente à escala. Todas as imagens dos produtos são meramente ilustrativas e podem não ser uma representação exata do produto. Limitação da responsabilidade: alguns produtos poderão não ter autorização de introdução no mercado/estar aprovados para venda em todos os mercados. Contacte o representante de vendas local da Nobel Biocare para conhecer a gama atual de produtos e a respetiva disponibilidade. Uso exclusivo por receita médica. Atenção: as leis federais dos EUA restringem a venda deste dispositivo a médicos dentistas, profissionais de saúde ou médicos autorizados, ou por prescrição destes. Consulte nas Instruções de Utilização todas as informações de prescrição, incluindo as indicações, contra-indicações, avisos e precauções.