


















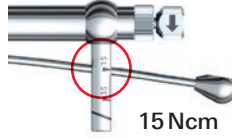









## Prothetische Komponenten

<p>Provisorisches Abutment Kunststoff          Provisorische Kappe Kunststoff          Gingivaformer (inklusive Anatomischer Gingivaformer (PEEK) und Slim Healing Abutment)          On1 (IOS) Heilkappe          Heilkappe Multi-unit</p>						<p>von Hand</p>
<p>Slim Temporary Abutment          Prothetikschauben für Versorgung auf Multi-unit Abutmentniveau          Provisorische Kappe Multi-unit Titan</p>				 <p>15 Ncm</p>		
<p>Kugelkopf-Abutment          17° Multi-unit Abutment          30° Multi-unit Abutment</p>						
<p>Abutments für NobelActive 3.0</p>  <p>Max. 15 Ncm</p>						
<p>Alle anderen provisorischen und endgültigen Abutments für Implantatsysteme von Nobel Biocare (inklusive Anatomisches Provisorisches Abutment (PEEK))</p>					 <p>35 Ncm</p>	
<p>On1 provisorische und endgültige Komponenten</p>						

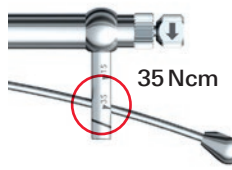**Hinweis:** Für prothetische Komponenten für andere Implantatsysteme gelten unter Umständen andere Drehmomentwerte. Stets die zugehörige Gebrauchsanweisung beachten.